




Nuance Audio Charging Pad

Notice d'utilisation Sécurité et garantie

Chargement

1

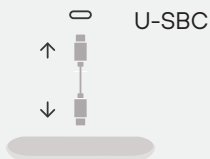

2



3



Voyants LED



 20-100%

 0-20%

POUR LA SUISSE

Nuance Audio™ Charging Pad

*Il est précisé que les réglementations applicables au Nuance Audio™ Glasses peuvent varier en fonction du pays dans lequel elles sont commercialisées. Par conséquent, il peut ne pas y avoir de correspondance parfaite entre la terminologie utilisée dans les différentes versions linguistiques de la « Notice d'utilisation – Sécurité & Garantie ».

Le Nuance Audio™ Charging Pad est désigné dans cette Notice d'utilisation également comme « Produit », « Appareil » ou « Équipement ».

UTILISATIONS ET UTILISATEURS PRÉVUS

Description et utilisation prévue. Le Nuance Audio™ Charging Pad est un accessoire destiné à permettre le chargement de l'assistant d'écoute* intégré dans les Nuance Audio™ Glasses. Le Nuance Audio™ Charging Pad doit être utilisé uniquement avec les Nuance Audio™ Glasses et est destiné uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Le Nuance Audio™ Charging Pad est utilisé pour charger les Nuance Audio™ Glasses sans fil. Il dispose d'une LED, en vue de dessus, afin de communiquer des informations à l'utilisateur concernant l'état de charge des Nuance Audio™ Glasses. Il fonctionne sans batterie grâce à un câble USB-C.

Pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le Nuance Audio™ Charging Pad doit être utilisé uniquement avec les Nuance Audio™ Glasses et est destiné uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Ne laissez pas les personnes de moins de 18 ans utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad. Les enfants peuvent s'étouffer ou suffoquer en cas d'ingestion du Nuance Audio™ Charging Pad. Gardez le Nuance Audio™ Charging Pad hors de portée des enfants. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur pour les images et l'explication de l'utilisation du Nuance Audio™ Charging Pad.

Restrictions de combinaisons.

Le Nuance Audio™ Charging Pad doit être utilisé uniquement avec les Nuance Audio™ Glasses. Pour les charger, utilisez le câble de chargement USB-C fourni ou un autre câble de type USB-C, avec une prise murale/adaptateur USB (non inclus). Il est fortement déconseillé de brancher le Nuance Audio™ Charging Pad à une prise murale/un adaptateur non certifié pour le marché dans lequel le Nuance Audio™ Charging Pad est commercialisé, et qui n'a pas été testé et approuvé conformément aux normes nationales et locales. La prise murale/adaptateur doit avoir un niveau de sortie minimum de DC5V/1A.

Lire les instructions.

Lisez et suivez toutes les instructions incluses avec le Nuance Audio™ Charging Pad avant de l'utiliser.

Précautions d'usage

1. N'utilisez pas le Nuance Audio™ Charging Pad si une partie de celui-ci est endommagée ou en surchauffe. Si le socle de charge émet un bruit inhabituel fort, débranchez-le immédiatement Nuance Audio™ Charging de la source d'alimentation, puis rendez-vous sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les informations de contact.
2. N'apportez pas de modifications non autorisées au Nuance Audio™ Charging Pad.

IMPORTANT! Si la batterie des Nuance Audio™ Glasses n'est pas entièrement rechargée tous les 6 mois depuis la dernière utilisation, cela pourrait entraîner des dommages permanents à la batterie, rendant les Nuance Audio™ Glasses inopérantes.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, d'inconfort ou de dommages matériels, veuillez lire et suivre les informations de santé et de sécurité ci-dessous avant d'utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad.

Interférence avec les dispositifs médicaux personnels.

Le Nuance Audio™ Charging Pad contient du matériel magnétique et des composants qui émettent des ondes radio, ce qui pourrait affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux tels que, mais sans s'y limiter, les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs implantables, ou les pompes à insuline. Consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d'utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad. Débranchez le Nuance Audio™ Charging Pad de l'alimentation et éloignez-le de votre autre dispositif médical si vous remarquez une interférence avec votre dispositif médical.

Interférence.

Vérifiez avant d'utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad dans des zones où les appareils électroniques ou sans fil sont restreints. Cela peut causer des interférences.

Eau et liquides.

Ne pas immerger dans l'eau et le garder à l'écart des liquides. L'exposition à l'eau ou à d'autres liquides peut endommager le Nuance Audio™ Charging Pad et entraîner des blessures. Cet Équipement n'est pas résistant à l'eau et n'est pas conçu pour résister à l'immersion ou à l'exposition à d'autres liquides. En cas d'exposition à l'eau, séchez soigneusement le Nuance Audio™ Charging Pad. Ne pas tremper dans l'eau ou le laisser dans un environnement humide pendant une longue période.

AVERTISSEMENT

Atmosphères potentiellement explosives

Ne pas stocker ou transporter de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le Nuance Audio™ Charging Pad. Ne pas utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad lorsque vous vous trouvez dans une zone avec des atmosphères potentiellement explosives.

Ne pas utiliser le Produit si cassé ou endommagé.

Surchauffe.

Gardez le Nuance Audio™ Charging Pad à l'écart du feu et de la chaleur excessive (par exemple, en évitant de le stocker en plein soleil, près de bougies ou dans une voiture chaude) pour éviter des brûlures ou des dommages au Nuance Audio™ Charging Pad. Le Nuance Audio™ Charging Pad ne devrait pas surchauffer lors d'une utilisation normale. Si c'est le cas, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez le service support. Gardez le Nuance Audio™ Charging Pad à l'écart du feu et des sources de chaleur.

Manipulez avec soin et évitez les dommages.

Le Nuance Audio™ Charging Pad est un Équipement électronique sensible et doit être manipulé avec précaution. Ne chauffez pas et ne déformez pas le Nuance Audio™ Charging Pad, car il pourrait être endommagé et même prendre feu. Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas excessivement le Nuance Audio™ Charging Pad. Ne pas utiliser le Nuance Audio™ Charging Pad s'il est endommagé. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de manipuler le Nuance Audio™ Charging Pad. Ne pas exposer au soleil. Ne le placez pas à proximité de produits électriques à haute puissance. Ne restez pas dans un environnement magnétique fort. Si le Produit cesse de fonctionner, son fonctionnement normal peut être rétabli en l'éloignant du champ magnétique.

Interactions et environnements

Limitations d'utilisation et de fonctionnalité

1. Placez le Nuance Audio™ Charging Pad à plat sur le bureau pour éviter qu'il ne bouge.
2. Placez les Nuance Audio™ Glasses pliées et à l'envers sur le Nuance Audio™ Charging Pad. Consultez le guide de l'utilisateur pour les images.
3. Assurez-vous que les Nuance Audio™ Glasses sont alignées avec les composants magnétiques du Nuance Audio™ Charging Pad, la LED du Nuance Audio™ Charging Pad s'allumera en orange ou en vert lorsqu'elles sont correctement alignées. Si l'alignement n'est pas précis, vous pouvez essayer d'ajuster l'angle ou la position des Nuance Audio™ Glasses.
4. Pendant le processus de chargement, ne déplacez pas ou ne faites pas vibrer les Nuance Audio™ Glasses de manière significative pour éviter d'affecter l'effet du chargement.
5. Si le Nuance Audio™ Charging Pad ne charge pas correctement ou rencontre des dysfonctionnements, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

Les exigences système détaillées et les conditions de service sont disponibles à l'adresse suivante: www.nuanceaudio.com.

Vol.

Vérifiez les restrictions de sécurité aérienne applicables aux appareils électroniques personnels avant de voler avec le Nuance Audio™ Charging Pad. Utilisez le Nuance Audio™ Charging Pad en conformité avec toutes les lois, règles et réglementations locales applicables. Faites preuve de bon sens et respectez les droits, la vie privée et la confidentialité des tiers.

Conditions de fonctionnement : -10°C à +45°C ; 101,3 kPa à 61,9 kPa ; humidité entre 20 % et 60 % sous +35°C pendant 1000 heures ; altitude maximale de 3 900 mètres pendant 1 heure, 0°C et +35°C.

Transport et stockage.

Le Nuance Audio™ Charging Pad doit rester fonctionnel après récupération des températures de stockage minimales de -30°C ou maximales de +75°C ; forte humidité de 90 % et température de +45°C pendant 288 heures ; exposition à une altitude de 12 000 mètres (18,8kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C.

Nettoyage et entretien.

Pour nettoyer le Nuance Audio™ Charging Pad, utilisez un chiffon humide et du savon neutre en évitant tous types de sprays, solvants, produits chimiques ou solutions de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs qui pourraient endommager le Nuance Audio™ Charging Pad. Gardez le Nuance Audio™ Charging Pad au sec. Si le Produit

devient excessivement humide, il y a un risque d'endommager la fonction de charge, séchez-le soigneusement, rangez-le dans un contenant avec des absorbeurs d'humidité ou dans un étui de séchage.

Charge, électricité et chaleur

Charge. Utilisez uniquement le Nuance Audio™ Charging Pad pour charger les Nuance Audio™ Glasses. Utilisez le câble de charge USB-C fourni ou d'autres câbles de type USB-C, C à C, avec une prise murale/adaptateur USB (non inclus). Il est fortement déconseillé de brancher le Nuance Audio™ Charging Pad à une prise murale/un adaptateur non certifié pour le marché dans lequel le Nuance Audio™ Charging Pad est commercialisé, et qui n'a pas été testé et approuvé conformément aux normes nationales et locales. La prise murale/adaptateur doit avoir un niveau de sortie minimum de DC5V/1A.

Ne nettoyez pas le Nuance Audio™ Charging Pad pendant qu'il est en charge. Ne chargez pas les Nuance Audio™ Glasses sur des surfaces métalliques ou dans des environnements à champ électrique ou magnétique fort. Inspectez périodiquement le Nuance Audio™ Charging Pad et le câble de charge USB-C pour détecter tout dommage ou signe d'usure. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée, fissurée ou si un composant interne est exposé. Ne tentez pas de réparer le Nuance Audio™ Charging Pad ou de remplacer des pièces vous-même, contactez plutôt le service support à l'adresse suivante: www.nuanceaudio.com.

Accessoires.

Utilisez uniquement avec les câbles USB-C et prises murales/adaptateurs compatibles indiqués ci-dessus. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager de façon permanente le Nuance Audio™ Charging Pad ou les Nuance Audio™ Glasses, annuler la garantie limitée de Luxottica, et augmenter le risque de blessures ou de dommages à d'autres biens.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CHARGEMENT SANS FIL

Fréquence de transmission	13,56 MHz
Fréquence de réception	13,56 MHz
Puissance rayonnée max/effective	1.8 W
Type de modulation	ASK à 100 % avec codage Miller modifié
Type de modulation	Modulation de charge avec sous-porteuse fc/16 (848 kbit/s), codage OOK avec Manchester

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie	Sans batterie
Durée de vie	3 ans
Durée de conservation	5 ans

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Température	De -30°C à +75°C
Humidité	De 20 % à haute humidité 90 % et température +45°C pendant 288 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 12 000 mètres (18,8kPa) pendant 12 heures à la fois -10°C et +45°C

CONDITIONS D'UTILISATION

Température	De -10°C à +45°C
Humidité	De 20 % à humidité 60 % sous +35°C pendant 1000 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 3 900 mètres pendant 1 heure à 0°C et +35°C ; 101,3 kPa à 61,9 kPa

Remarque : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent remettre en cause la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner l'Équipement. Aucune partie de ce travail ne peut être reproduite, modifiée, distribuée ou autrement utilisée sans autorisation écrite préalable.

Déclaration de conformité UE

Luxottica Group S.p.A déclare par la présente que cet Appareil est conforme à la Directive sur les équipements radio 2014/53/UE, au Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 2017/745 sur les dispositifs médicaux et à la Directive RoHS II 2011/65/UE. Le texte complet de la Déclaration de Conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration.

Eloigner Nuançe Audio™ Charging Pad du ventre des femmes enceintes. Éloigner le Nuançe Audio™ Charging Pad du bas-ventre des adolescents. Utilisez le Nuançe Audio™ Charging Pad dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements utilisés.



L'utilisateur final est tenu de signaler tout incident grave survenant en relation avec l'utilisation de l'Appareil à l'autorité compétente de l'État membre où l'incident s'est produit (pour la France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de santé) et au fabricant de l'appareil.

Informations sur le recyclage

Le Nuançe Audio™ Charging Pad et le câble de charge USB-C ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et doivent être déposés dans une installation de collecte appropriée pour le recyclage. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée des déchets, veuillez consulter la page suivante: www.nuanceaudio.com.

Le symbole de la poubelle barrée ci-dessous signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, le Nuançe Audio™ Charging Pad et le câble de charge USB-C doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque le Nuançe Audio™ Charging Pad et/ou le câble de chargement arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Alternativement, apportez le Nuançe Audio™ Charging Pad et le câble de chargement USB-C à un magasin affilié. La collecte séparée et le recyclage du Nuançe Audio™ Charging Pad et du câble de chargement au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Informations sur les DEEE

Luxottica s'engage à l'élimination, la réutilisation, le recyclage et la récupération appropriés des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (« DEEE »).

Les DEEE ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques ordinaires. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez consulter l'adresse : www.nuanceaudio.com.

Nuançe Audio™ est une marque déposée d'Essilor International SAS.

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE DE LUXOTTICA

Cette garantie limitée pour le consommateur (la « Garantie ») est fournie par Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italie (« Luxottica »). Cette Garantie couvre les défauts et dysfonctionnements du nouveau Produit Luxottica qu'elle accompagne. La Garantie est valable pendant un (1) an à compter de la date d'achat du Produit (la « Période de Garantie Limitée »). Cependant, si vous achetez le Produit au sein de l'UE, du Royaume-Uni ou de l'AELE, la Période de Garantie Limitée sera de deux (2) ans. Nous garantissons que le Produit, dans des conditions d'utilisation normales et prévues, fonctionnera conformément aux spécifications techniques ou à la documentation du produit accompagnante (la « Fonctionnalité Garantie ») pendant la Période de Garantie Limitée.

Pour éviter toute ambiguïté, tout service nécessaire pour atteindre la Fonctionnalité Garantie peut être mis à jour, modifié ou limité, tant qu'il continue de maintenir (ou dépasser) la Fonctionnalité Garantie. Cette Garantie n'est pas disponible pour les produits achetés auprès de toute source autre que Luxottica ou un revendeur agréé. Cette Garantie est valable uniquement avec une preuve d'achat qui montre clairement la date d'achat. Si vous nous envoyez un Produit sans preuve d'achat valide, nous nous réservons le droit de vous retourner le Produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le Produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez le récupérer.

Cette Garantie est limitée et ne s'applique pas aux rayures des verres. L'installation ou le remplacement de tout verre* doit être effectué par Luxottica ou un revendeur agréé Luxottica pour les Nuançe Audio™ Glasses. Tout dommage causé par l'installation, le remplacement ou la modification non

autorisés des verres n'est pas couvert par cette Garantie. Si votre Produit est défectueux ou présente un dysfonctionnement, nous réparerons ou remplacerons ce Produit, afin que le Produit fonctionne essentiellement conformément à la Fonctionnalité Garantie. Dans certains cas, nous pourrions, à la place, rembourser le prix d'achat payé pour le Produit. Votre recours en vertu de cette Garantie sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du Produit, sauf si cela est impossible ou disproportionné pour nous.

Cette Garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits en vertu des lois ou règlements de protection des consommateurs dans la juridiction d'achat ou, si différente, dans votre pays de résidence. Ces droits varient d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre. Les avantages conférés par cette Garantie s'ajoutent et n'affectent pas les droits et recours conférés par ces lois et règlements de protection des consommateurs (y compris, sans limitation, les lois nationales mettant en œuvre la Directive 1999/44/CE et la Directive 2019/771).

Vous avez droit à des recours gratuits en cas de non-conformité du Produit aux exigences prévues par les lois de votre juridiction. Les autres recours disponibles selon les lois de votre juridiction ne sont pas affectés par cette Garantie. Pour obtenir des informations complètes sur vos droits selon les lois de votre juridiction, veuillez consulter ci-dessous et/ou contacter votre organisation locale de défense des droits des consommateurs/bureau de conseil aux citoyens.

Cette garantie s'applique uniquement aux pays vers lesquels Luxottica expédie et fournit une assistance. Rendez-vous visite sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations sur les pays pris en charge par Luxottica et des informations utiles sur le service et les contacts. L'assistance technique offerte par Luxottica vous aide à diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés aux défauts du produit. Lorsque vous contactez Luxottica par téléphone, des frais de communication longue distance peuvent s'appliquer, en fonction de votre zone d'appel.

Pour le consommateur en France:

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui. Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1°** Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2°** La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3°** La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4°** La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code

de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

La présente garantie commerciale n'accorde pas de droits supplémentaires par rapport à la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation. Cette garantie commerciale n'affecte en aucun cas les droits et recours des consommateurs au titre de la garantie légale de conformité.

La clause de limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux consommateurs français en cas de manquement à l'une de ses obligations par Luxottica.

ENREGISTREMENT

L'enregistrement du Produit n'est pas requis comme condition de couverture sous cette garantie, mais certains produits Luxottica nécessitent une connexion périodique à un compte en ligne pour assurer une fonctionnalité complète.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE

Si vous avez un problème avec votre Produit, veuillez nous rendre visite sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et le contact, et pour obtenir un service de garantie. Vous pouvez en outre nous contacter au numéro suivant : + 33 805 980 597. Sauf indication contraire spécifiée ailleurs dans cette garantie et sauf disposition contraire de la loi applicable de l'État, pour faire une réclamation de garantie, vous devez retourner votre Produit à Luxottica ou au revendeur agréé auprès duquel le Produit a été acheté, accompagné de votre preuve d'achat. Si votre réclamation de garantie est jugée valide et que nous trouvons un défaut ou un dysfonctionnement couvert par cette garantie, nous remplacerons ou réparerons le Produit afin qu'il fournisse la fonctionnalité garantie.

Sous réserve de vos droits en vertu de toute loi locale, si nous déterminons qu'un Produit doit être remplacé, le remplacement peut être un Produit neuf, remis à neuf ou reconditionné. La période de garantie limitée est prolongée d'une durée égale au temps pendant lequel nous avons eu le Produit en notre possession pour l'exécution de la garantie, comme décrit ci-dessus. Sauf pour vos droits et recours disponibles en vertu de vos lois locales, la fourniture d'un Produit réparé ou de remplacement ne redémarre ni n'étend la période de garantie limitée. S'il est constaté qu'aucun des moyens énumérés n'est raisonnable pour corriger un défaut ou un dysfonctionnement, nous pouvons alors vous rembourser le prix que vous avez payé pour acheter le Produit. Nous pouvons ne pas vous retourner le Produit d'origine. Si votre réclamation de garantie n'est pas jugée valide, nous nous réservons le droit de vous retourner le Produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le Produit pendant trente (30) jours pour votre retrait avant qu'il ne soit éliminé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige autrement, toutes les dépenses engagées par vous pour retourner le Produit pour évaluation de la garantie seront supportées par Luxottica à l'aide d'une étiquette de retour prépayée qui vous sera fournie pour vous permettre de retourner votre Produit pour évaluation de la garantie gratuitement, ou d'autres méthodes répertoriées sur www.nuanceaudio.com.

Si le Produit retourné est jugé (à la discrétion de Luxottica) éligible pour une réclamation de garantie valide, Luxottica prendra automatiquement en charge les frais de transport supplémentaires nécessaires pour vous retourner le Produit réparé ou de remplacement. Si la réclamation de garantie est jugée invalide et que nous ne trouvons pas de défaut ou de dysfonctionnement couvert par cette garantie, nous vous contacterons pour savoir si vous souhaitez que nous effectuions des réparations à vos frais et, en tout état de cause, vous serez facturé pour le transport sortant pour retourner votre Produit en fonction des tarifs d'expédition standard de Luxottica.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DE : LA LIVRAISON OU L'INSTALLATION, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA MISE EN PLACE DU PRODUIT ET/OU L'AJUSTEMENT DES COMMANDES CLIENT SUR LE PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE UTILISATION, UN ABUS, DES ACCIDENTS, UN INCENDIE, UN VOL, UNE DISPARITION, UN ÉGAREMENT, DES FLUCTUATIONS ET DES SURTENSIONS ÉLECTRIQUES, DES CONNEXIONS À UNE TENSION INAPPROPRIÉE OU UNE TENSION DE LIGNE ÉLECTRIQUE INCORRECTE, DES VIRUS, DES MALWARES, UNE CONDUITE IMPRUDENTE, VOLONTAIRE OU INTENTIONNELLE OU UNE NÉGLIGENCE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE RÉPARATION DU PRODUIT QUI

N'A PAS ÉTÉ PRÉALABLEMENT AUTORISÉE PAR LUXOTTICA. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION DU PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION DU PRODUIT OU LE NON-ACCOMPLISSEMENT DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA COMBINAISON DU PRODUIT AVEC D'AUTRES PRODUITS, ACCESSOIRES, PIÈCES OU COMPOSANTS NON MARQUÉS LUXOTTICA OU L'UTILISATION DE PRODUITS, ÉQUIPEMENTS, SYSTÈMES, SERVICES, FOURNITURES DE PIÈCES, ACCESSOIRES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, RÉPARATIONS, CÂBLAGE EXTERNE OU CONNECTEURS NON FOURNIS OU AUTORISÉS PAR LUXOTTICA QUI ENDOMMAGENT LE PRODUIT. LES PROBLÈMES DE SIGNAL, LES PROBLÈMES DE RÉCEPTION ET LA DISTORSION LIÉS AU BRUIT, À L'ÉCHO, AUX INTERFÉRENCES OU À D'AUTRES PROBLÈMES DE TRANSMISSION ET DE LIVRAISON DE SIGNAL. TOUT ÉQUIPEMENT OU COMPOSANT QUI N'ÉTAIT PAS INCLUS DANS, OU AVEC VOTRE PRODUIT TEL QU'IL A ÉTÉ VENDU À L'ORIGINE. L'USURE NORMALE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT OU UN EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT INAPPROPRIÉ LORS DU RETOUR DU PRODUIT À LUXOTTICA OU À UN DÉTAILLANT DE COLLECTE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MODIFICATION OU UNE ADAPTATION QUI PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE À UN PRODUIT DE FONCTIONNER DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU, FABRIQUÉ, APPROUVÉ ET/OU AUTORISÉ, OU LA RÉPARATION DU PRODUIT QUI RÉSULTE EN DES DOMMAGES À LA SUITE DE CES MODIFICATIONS. LES DOMMAGES AUX PRODUITS DONT LE CODE ANTI-CONTREFAÇON (OU ÉQUIVALENT) A ÉTÉ RETIRÉ, EFFACÉ, DÉFIGURÉ, ALTÉRÉ OU RENDU ILLISIBLE.

Cette garantie n'inclut aucune garantie spécifique que le produit sera exempt d'erreurs, ou concernant le temps de fonctionnement ou la disponibilité continue des fonctionnalités de sécurité des données des comptes en ligne, que tout site en ligne fonctionnera sans interruption ou sans erreur. Sauf aux États-Unis et dans la mesure où cela est interdit par toute loi applicable dans un autre pays, cette garantie ne s'appliquera pas si un Produit est retourné avec des étiquettes retirées, endommagées ou altérées, ou s'il a subi toute modification, y compris le retrait non autorisé de tout composant ou couvercle externe.

GARANTIES IMPLICITES

SAUF DANS L'UE, L'AELE ET LE ROYAUME-UNI, ET SAUF SI INTERDIT PAR LA LOI LOCALE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION EST REFUSÉE.

POUR LES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE NON RÉFUTABLE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE ICI.

SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR PROTÉGÉ PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DU QUÉBEC, CE DÉNI DE GARANTIE NE LIMITE PAS VOS DROITS, Y COMPRIS VOTRE DROIT DE DEMANDER L'APPLICATION DES GARANTIES LÉGALES PRÉVUES AUX ARTICLES 34 À 54 DE CETTE LOI.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

SAUF DANS LA MESURE DES INTERDICTIONS ÉDICTÉES PAR TOUTE LOI APPLICABLE, LUXOTTICA NE SERA PAS, EN VERTU DE CETTE GARANTIE, RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE LUXOTTICA POUR TOUTE RÉCLAMATION LIÉE À OU DÉCOULANT DE CETTE GARANTIE EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT, PLUS LES INTÉRÊTS AUTORISÉS PAR LA LOI, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RÉCLAMATION.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DES ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS DE SA VOLONTÉ, TELS QUE LES CATASTROPHES NATURELLES, LES VIRUS, LES DÉGÂTS MATÉRIELS, LA PERTE D'UTILISATION, L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, LES PERTES DE PROFITS, LES PERTES DE DONNÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PUNITIF OU SPÉCIAL, QUEL QU'EN SOIT LE MODE DE PRODUCTION, EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE, DE CONTRAT OU DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE).

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu des lois nationales et locales applicables à la vente de biens de consommation.

Certains pays, États, provinces et territoires (y compris l'UE, l'AELE et le Royaume-Uni) n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni l'exclusion ou la limitation de certains types de dommages ou de pertes, ou encore n'imposent pas de restrictions sur la durée d'une garantie ou d'une condition implicite. Par conséquent, les limitations ou exclusions décrites dans cette garantie peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes et à jour - Sécurité et Garantie, veuillez vous référer aux instructions dans la section Support de l'application Nuance Audio™ App et à la page web suivante: nuanceaudio.com/support/manual-guide.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Assistance: nuanceaudio.com/contact-us

Ce guide de démarrage rapide s'applique aux modèles
de Nuance Audio™ Charging Pad AAW0001EL et REL0063A0



Raccolta carta
Papel y cartón

