



Nuance Audio afstandsbediening

**Gebruiksaanwijzing
Veiligheid & garantie**

1ste keer koppelen

1 Houd ingedrukt

2 Trek aan het lipje



- Knipperende blauwe LED - Koppelen is bezig
- Effen blauwe LED - Koppelen voltooid

Extra koppelen

1 A. Vouw de bril op
B. Houd de knop ingedrukt

2 Houd de zijknop ingedrukt



- Laat los wanneer de blauwe LED knippert

LED-indicaties



Opnieuw
verbinden



Batterijniveau
laag



Bril niet
gevonden

Audiostanden

Druk



Volume

Druk +/-



Batterij CR2450

1



2



3



Gebruiksaanwijzing - Veiligheid & garantie
VOOR NEDERLAND

Nuance Audio™ afstandsbediening

* De beschikbaarheid van producten, wettelijke voorschriften en garantievoorzwaarden kunnen per land verschillen. Houd er rekening mee dat de productcategorie van de Nuance Audio™ bril per land kan verschillen, afhankelijk van de markt waar het product wordt verkocht. Sommige landen hanteren geen eigen lokale categorie (zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland). Hierdoor kan de terminologie die gebruikt wordt om de productcategorie aan te duiden, variëren in de verschillende taalversies van deze Gebruiksaanwijzing – Veiligheid & garantie (bijvoorbeeld "assistant d'écoute" in Frankrijk versus "hearing aid" in andere talen). Omdat dit document per taal in plaats van per land georganiseerd is, weerspiegelt de terminologie die in een bepaalde taalversie voor het product wordt gebruikt, niet noodzakelijkerwijs de categorie die van toepassing is in alle landen waar die taal wordt gesproken. Hoewel Frans bijvoorbeeld een van de officiële talen van Zwitserland is, is de terminologie in de Franse versie niet van toepassing op de Zwitserse markt; in Zwitserland is de correcte terminologie "hoortoestel".

WAARSCHUWING

- **INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcelbatterij.
- Inname kan leiden tot **DOOD** of ernstig letsel.
- Een ingeslikte knoopcelbatterij kan al binnen 2 uur interne chemische brandwonden veroorzaken.
- **Batterij is gevaarlijk, HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK** van **KINDEREN**.
- **Zoek onmiddellijk medische hulp als wordt vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is ingebracht**, dit kan binnen 2 uur of minder ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.



De Nuance Audio™ afstandsbediening wordt in deze gebruiksaanwijzing ook wel aangeduid als "Product", "Hulpmiddel" of "Uitrusting".

BEDOELDE TOEPASSINGEN & GEBRUIKERS

Beoogd gebruik. De Nuance Audio™ afstandsbediening-accessoire is bedoeld om de functionaliteit van de Nuance Audio™ bril te ondersteunen, met name om de instellingen van het hoortoestel* te bedienen. De Nuance Audio™ afstandsbediening wordt gebruikt om het volume en de standen van de Nuance Audio™ bril draadloos te bedienen.

De twee mogelijke standen van het hoortoestel zijn:

- **Frontaal:** wanneer deze functie geselecteerd is, worden de geluiden die uit de richting komen waar u naar kijkt, versterkt en worden alle andere geluiden gedempt. Deze functie wordt over het algemeen gebruikt in een lawaaierige omgeving, wanneer u de persoon die tegen u praat beter wilt verstaan.
- **All-around:** deze functionaliteit versterkt alle geluiden om u heen zonder onderscheid te maken.

De Nuance Audio™ afstandsbediening is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ bril en alleen door personen van 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ afstandsbediening werkt wanneer deze via Bluetooth met de bril is gekoppeld en wordt geleverd met een knoopcelbatterij. De knoopcelbatterij (CR2450) kan door de klant worden vervangen. De Nuance Audio™ bril is een medisch hulpmiddel. De Nuance Audio™ afstandsbediening is bedoeld als accessoire voor de Nuance Audio™ bril.

Voor personen van 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ afstandsbediening is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ bril en alleen door personen van 18 jaar en ouder. Laat niemand onder de 18 jaar de Nuance Audio™ afstandsbediening gebruiken. Kinderen kunnen stikken of verstikken als ze dit product inslikken. Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor afbeeldingen en uitleg over het gebruik van de Nuance Audio™ afstandsbediening.

Beperkingen op combinaties. De Nuance Audio™ afstandsbediening werkt alleen met de Nuance Audio™ bril, wat betekent dat het product niet met andere hulpmiddelen werkt.

Lees de instructies. Lees en volg alle instructies die samen met de Nuance Audio™ afstandsbediening zijn geleverd voordat u deze gebruikt.

Waarschuwingen.

1. Wanneer u het volume aanpast, verhoog het dan geleidelijk totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.
2. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening niet als een onderdeel beschadigd is of oververhit raakt. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Nuance Audio™ afstandsbediening en ga vervolgens naar www.nuanceaudio.com voor nuttige service- en contactinformatie.

Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan dit product aan.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING Om het risico op persoonlijk letsel, ongemak of materiële schade te verminderen, dient u dit te lezen en de onderstaande gezondheids- en veiligheidsinstructies te volgen voordat u de Nuance Audio™ afstandsbediening gebruikt.

Interferentie met persoonlijke medische hulpmiddelen. Dit product bevat magnetisch materiaal en componenten die radiogolven uitzenden. Deze golven kunnen de werking van medische hulpmiddelen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld pacemakers, andere implanteerbare apparaten of insulinepompen. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische hulpmiddel voordat u dit product gebruikt. Schakel de elektronische functies van het product uit als u merkt dat er storingen optreden in de werking van uw medisch hulpmiddel.

Storing. Controleer dit voordat u de Nuance Audio™ afstandsbediening gebruikt in ruimtes waar elektronische apparaten of draadloze apparaten niet zijn toegestaan. Dit kan storingen veroorzaken.

Autorijden. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening niet tijdens het autorijden.

Water en vloeistoffen. Niet blootstellen aan of onderdompelen in water. Langdurige blootstelling aan water kan de Nuance Audio™ afstandsbediening beschadigen. De Nuance Audio™ afstandsbediening is niet ontworpen om onderdompeling of langdurige blootstelling aan water of andere vloeistoffen te weerstaan. Droog de Nuance Audio™ afstandsbediening na contact met water grondig af met een droge doek.

WAARSCHUWING Mogelijk explosieve atmosferen. Sla geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen op en vervoer deze niet in hetzelfde compartiment als de Nuance Audio™ afstandsbediening. Schakel uw Nuance Audio™ afstandsbediening uit en verwijder of plaats geen batterijen wanneer u zich in een gebied met mogelijk explosieve atmosferen bevindt. Gebruik ze niet als ze kapot of beschadigd is. Inspecteer de Nuance Audio™ afstandsbediening regelmatig op schade of tekenen van slijtage. Gebruik ze niet als een onderdeel beschadigd of gebarsten is, of als een intern onderdeel zichtbaar is. Probeer de Nuance Audio™ afstandsbediening niet zelf te repareren, maar neem contact op met de klantenservice via www.nuanceaudio.com.

Oververhitting. Houd de Nuance Audio™ afstandsbediening uit de buurt van vuur en overmatige hitte (bijvoorbeeld door bewaren in direct zonlicht, bij kaarsen of in een hete auto) om brandwonden of schade aan de Nuance Audio™ afstandsbediening te voorkomen. De Nuance Audio™ afstandsbediening mag tijdens normaal gebruik niet oververhit raken. Als dit het geval is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Houd de Nuance Audio™ afstandsbediening uit de buurt van vuur en warmtebronnen.

Voorzichtig behandelen en schade voorkomen. De Nuance Audio™ afstandsbediening is een gevoelig elektronisch apparaat, het bevat gevoelige elektronische hardware en moet met de nodige zorg worden behandeld. Niet verhitten of buigen, omdat het beschadigd kan raken en zelfs vlam kan vatten. Laat de Nuance Audio™ afstandsbediening niet vallen, sla er niet op en schud ze niet overmatig. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening niet als ze beschadigd is. Probeer de Nuance Audio™ afstandsbediening niet te openen, uit elkaar te halen of te manipuleren. Niet blootstellen aan de zon.

Interacties en omgevingen. Let op. Het gebruik van de Nuance Audio™ afstandsbediening kan u afleiden of de reactietijd op gevaren verlengen. Let altijd goed op uw omgeving, inclusief verkeersborden en obstakels.

Levensduur. De verwachte levensduur van de Nuance Audio™ afstandsbediening is 5 jaar vanaf de productiedatum.

Gebruiksbeperkingen. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening niet in omgevingen met sterke elektrische of magnetische velden. De effectieve gebruiksafstand van de Nuance Audio™ afstandsbediening bedraagt minder dan 25 meter.

Vliegen. Controleer de geldende veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke elektronische apparaten in de luchtvaart voordat u met de Nuance Audio™ afstandsbediening gaat vliegen. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften.

Bedrijfsomstandigheden. -10°C tot 45°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa; luchtvochtigheid tussen 20% en 60% bij 35°C gedurende 1000 uur; maximale hoogte van 13.000 voet (3.962,4 m) gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C.

Transport en Opslag. -40°C tot 85°C; luchtvochtigheid tussen 20% en 90%; de afstandsbediening moet functioneel blijven na herstel na een niet-operationele blootstelling op een hoogte van 40.000 voet (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij zowel -10°C als 45°C.

Schoonmaak en onderhoud. Om de Nuance Audio™ afstandsbediening schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en neutrale zeep. Vermijd alle soorten sprays, oplosmiddelen, chemische stoffen of reinigingsmiddelen die alcohol of ammoniak bevatten. Gebruik geen vuile of schurende doeken die de Nuance Audio™ afstandsbediening kunnen beschadigen. Als het product te nat wordt, bestaat het risico dat het beschadigd raakt. Droog het daarom grondig af en bewaar het in een bakje met wateronttrekkend middel of in een drooghoes.

Batterij. De Nuance Audio™ afstandsbediening bevat een knoepcelbatterij die de gebruiker kan vervangen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand- of chemisch verbrandingsgevaar opleveren. Niet in de auto achterlaten onder direct zonlicht of blootstellen aan overmatige hitte of verbranden. Gooi de batterij weg volgens de instructies en lokale voorschriften. Verwijder gebruikte batterijen en recycle of gooi ze direct weg volgens de plaatselijke voorschriften en houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET weg bij het huisvuil en verbrand ze niet. Verwijder en recycle of verwijder batterijen onmiddellijk uit apparatuur die gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, volgens de plaatselijke voorschriften. Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen, zoals alkaline-, koolstof-zink of oplaadbare batterijen. De verwachte levensduur van de batterij is minimaal 6 maanden onder standaard gebruiksomstandigheden vanaf het moment waarop het beschermlijpje van de batterij verwijderd wordt. Volg voor het vervangen van

de batterij de aanwijzingen in de gebruikershandleiding die bij de Nuance Audio™ afstandsbediening is meegeleverd en gebruik een pin zo klein als een penpunt of een tandenstoker om het lipje van de afstandsbediening te openen. Wees voorzichtig bij het vervangen van de batterij om te voorkomen dat de structuur van de Nuance Audio™ afstandsbediening beschadigd raakt. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst volgens de polariteit (+ en -). Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten het bereik van kinderen. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Forceer geen ontlading, laad niet opnieuw op, demonteer niet, verhit niet boven 100°C en verbrand niet. Dit kan leiden tot letsel door ontvluchting, lekkage of explosie, wat chemische brandwonden tot gevolg kan hebben. Batterijgerelateerde gevaren zijn brand, explosie en brandwonden. Veroorzaak geen kortsluiting met de batterij, plet of verbrand deze niet en stel de inhoud niet bloot aan water. Houd batterijen altijd buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen. Slik de batterij niet in. Compatibele batterijen zijn lithium 3V CR2450 knoopcelbatterijen. Ook gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. Neem contact op met een lokaal antigifcentrum voor informatie over de behandeling.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Bediening audiostand	Knop op het apparaat
Volumeregeling	Knoppen op het apparaat
DRAADLOZE VERBINDING	
Bluetooth® compatibel	Ja, BLE
Bluetooth® compatibel met telefoongesprekken	Nee
Bedrijfsfrequentie	2402-2480 MHz (RF)
Maximaal uitgestraald vermogen	Vrije ruimte maximale EIRP is -3,22 dBm
Modulatie	GFSK
Kanaalafstand	2MHz
Kanaalbandbreedte	2MHz
Aantal kanalen	40
BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Batterij	Lithium 3V CR2450 knoopcelbatterij
Levensduur	5 jaar
Houdbaarheid	5 jaar
TRANSPORT- EN OPSLAGVOORWAARDEN	
Temperatuur	Van -40°C tot 85°C
Vochtigheid	Van 20% tot hoge luchtvochtigheid van 90% en een temperatuur van 45°C gedurende 288 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 40.000 voet (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij zowel -10 °C als 45 °C
WERKINGSOMSTANDIGHEDEN	
Temperatuur	Van -10°C tot 45°C
Vochtigheid	Van 20% tot 60% luchtvochtigheid bij 35°C gedurende 1000 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 13.000 voet (3.962,4 m) gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa

Opmerking: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het hulpmiddel te bedienen ongeldig maken. Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd, gewijzigd, verspreid of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

EU-conformiteitsverklaring

Luxottica Group S.p.A verklaart hierbij dat dit hulpmiddel voldoet aan de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU, de EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en RoHS II-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.essilorluxottica.com/nl/merken/conformiteit-verklaring

Radiofrequentie en vermogen: BLE van het product: 2402-2480 MHz < 20 dBm;

Houd de Nuance Audio™ afstandsbediening uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen. Houd de Nuance Audio™ afstandsbediening uit de buurt van de onderbuik van adolescenten. Gebruik de Nuance Audio™ afstandsbediening bij goede ontvangst om de hoeveelheid elektromagnetische straling te verminderen.

De eindgebruiker is verplicht om elk ernstig incident dat zich voordoet bij het gebruik van het hulpmiddel te melden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden en aan de fabrikant van het hulpmiddel.

Informatie over weggooien

De Nuance Audio™ afstandsbediening mag niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Voor meer informatie over hoe dit correct weg te gooien, ga naar www.nuanceaudio.com. De symbolen van de doorgestreepte afvalbakken hieronder betekenen dat, volgens de plaatselijke wet- en regelgeving, de batterij van de Nuance Audio™ afstandsbediening en/of de Nuance Audio™ afstandsbediening apart van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer de Nuance Audio™ afstandsbediening het einde van zijn levensduur bereikt, breng deze dan samen met de batterij naar een door de lokale autoriteiten aangeduid inzamelpunt. Als alternatief kunt u het product en de batterij naar een aangesloten winkel brengen.

De batterij kan door de eindgebruiker veilig worden weggegooid volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding. Het apart inzamelen en recyclen van het product en/of de batterij wanneer deze worden weggegooid, draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het product op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.



Informatie over AEEA

Luxottica zet zich in voor het correct weggooien, hergebruik, de recycling en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ("AEEA"). AEEA mag niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Gooi batterijen op een milieuvriendelijke manier weg, conform de nationale wettelijke of verplichte voorschriften. Voor meer informatie over correct weggooien, kunt u terecht op www.nuanceaudio.com.

Veiligheids certificeringen voor de batterij van de afstandsbediening

Dit artikel beschrijft de internationale veiligheidsnormen waaraan de batterij van de afstandsbediening voldoet. Alle batterijen van de afstandsbediening zijn getest, gecertificeerd en voldoen aan de volgende internationale veiligheidsnormen:

- UN38.3-vervoersvoorschriften van de Verenigde Naties (VN) UN38.3: Behandelt de veiligheid van batterijen tijdens luchttransport.
- Verordening (EU) 2023/1542
- UL1642-norm voor lithiumbatterijen

WAARSCHUWING De batterij bevat geen kwik. Niet doorboren of verbranden, niet samenknijpen en niet in water onderdompelen.

Nuance Audio™ is een geregistreerd handelsmerk van Essilor International SAS.

LUXOTTICA BEPERKTE GARANTIE

Deze beperkte consumentengarantie (de "garantie") wordt verstrekt door Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milaan, Italië ("Luxottica"). Deze garantie dekt defecten en storingen in het Luxottica-product waarmee zij wordt geleverd. De garantie loopt één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van het product (de "beperkte garantieperiode"). Als u het product echter binnen de EU of EFTA aankoopt, bedraagt de beperkte garantieperiode twee (2) jaar. Voor Nederland bedraagt de garantieperiode drie (3) jaar. Deze garantie is alleen van toepassing op die landen waar Nuance officieel op de markt wordt gebracht en ondersteund, wat betekent landen waar het product is gecertificeerd en Luxottica de bevoegdheid heeft om het te verdelen ("garantiegebied"). Wij garanderen dat het product, bij normaal en beoogd gebruik, gedurende de beperkte garantieperiode in overeenstemming met de technische specificaties of de bijbehorende productdocumentatie (de "gegarandeerde functionaliteit") zal werken. Voor alle duidelijkheid: alle diensten die nodig zijn om de gegarandeerde functionaliteit te bereiken, kunnen worden bijgewerkt, gewijzigd of beperkt, zolang de gegarandeerde functionaliteit behouden blijft (of wordt overtroffen). Deze garantie is niet van toepassing op producten die bij een andere bron dan Luxottica of een erkende dealer zijn aangekocht. Deze garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Als u ons een product stuurt zonder geldig aankoopbewijs, behouden wij ons het recht voor om het product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf zijn betaald, bewaren wij het product dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast ook andere rechten hebben op grond van consumentenbeschermingswetten of -regelgeving in het land waar het product is gekocht of, indien anders, waar u zich bevindt, mits dit product daar op het moment dat de garantie van toepassing is officieel op de markt wordt gebracht. Dergelijke rechten verschillen van staat tot staat en van land tot land. De voordelen die deze garantie

verleent, zijn aanvullend op en doen geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen die worden toegekend door dergelijke consumentenbeschermingswetten en -regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, nationale wetten ter implementatie van Richtlijn 1999/44/EG en Richtlijn 2019/771). U heeft recht op kosteloze oplossingen indien het product niet voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de wetten van het garantiestedingsgebied. De andere rechtsmiddelen die volgens de wetgeving in het garantiestedinggebied voor u beschikbaar zijn, worden niet beïnvloed door deze garantie. Voor volledige informatie over uw rechten volgens de wetgeving in het garantiestedinggebied, zie hieronder en/of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie/ burgeradviesbureau. Bezoek ons op www.nuanceaudio.com voor informatie over de landen waar Luxottica ondersteuning biedt en om nuttige service- en contactinformatie te verkrijgen. De reikwijdte van de technische ondersteuning die Luxottica aanbiedt, bestaat uit het helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met defecten in het product. Houd er rekening mee dat bij telefonisch contact met Luxottica, afhankelijk van uw gebied, kosten voor interlokaal bellen in rekening kunnen worden gebracht.

REGISTRATIE

Productregistratie is geen voorwaarde voor dekking onder deze garantie, maar voor sommige Luxottica-producten is periodieke verbinding met een online account vereist om de volledige functionaliteit te garanderen.

HOE EEN GARANTIECLAIM INDIENEN

Als u een probleem heeft met uw product, tenzij elders in deze garantie specifiek anders vermeld is en behoudens de toepasselijke wetgeving, dient u om een garantieclaim in te dienen uw product samen met het aankoopbewijs terug te brengen naar de erkende dealer waar u het product heeft gekocht. Ga naar www.nuanceaudio.com voor nuttige informatie over service- en contactgegevens. Als uw garantieclaim geldig wordt bevonden en wij een defect of storing bevestigen die onder deze garantie valt, zal de juiste oplossing worden bepaald. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij een van de volgende acties ondernemen: i) Het product repareren, maar alleen wanneer reparatie technisch mogelijk is (gezien het hoogtechnologische karakter van het product is de enige mogelijke reparatie het vervangen van de lens); of (ii) Het product vervangen; of (iii) De aankoopprijs van het product terugbetalen, indien noch reparatie noch vervanging mogelijk of gepast is. Onder voorbehoud van uw rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving van het garantiestedinggebied, ligt de keuze van de oplossing bij het bedrijf. Onder voorbehoud van uw rechten onder de plaatselijke wetgeving, kan een product dat vervangen moet worden, indien wij daartoe besluiten, een nieuw, gereviseerd of opnieuw gefabriceerd product zijn. De beperkte garantietermijn wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de tijd waarin wij het product in ons bezit hadden voor de uitvoering van de garantie, zoals hierboven beschreven. Voor zover uw rechten en rechtsmiddelen op grond van de lokale wetgeving onverlet blijven, leidt het verstrekken van een gerepareerd of vervangen product niet tot het opnieuw ingaan of enige verlenging van de beperkte garantietermijn. We kunnen het originele product mogelijk niet aan u retourneren. Als uw garantieclaim niet gegrond wordt bevonden, behouden wij ons het recht voor het product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf worden betaald, bewaren wij het product gedurende dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen, waarna het wordt vernietigd. Behalve voor zover de wet anders vereist, worden eventuele kosten die u maakt voor het retourneren van het product voor garantiebeoordeling door Luxottica gedragen. Als u uw product naar Luxottica moet retourneren, ontvangt u een vooraf betaald verzendlabel. Als de garantieclaim ongeldig wordt bevonden en wij geen defect of storing vaststellen die onder deze garantie valt, nemen wij contact met u op om te vragen of u wilt dat wij de reparatie op uw kosten uitvoeren. In elk geval worden de verzendkosten voor het terugsturen van uw product in rekening gebracht volgens de standaardtarieven van Luxottica.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

DEZE GARANTIE DEKT NIET, EN LUXOTTICA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR: LEVERING OF INSTALLATIE, OF ARBEIDSKOSTEN VOOR HET INSTELLEN VAN HET PRODUCT EN/OF HET AANPASSEN VAN KLANTINSTELLINGEN OP HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK, ONEIGENLIJK GEBRUIK, ONGELUKKEN, BRAND, DIEFSTAL, VERDWIJNING, VERKEERDE PLAATSING, STROOMSCHOMMELINGEN EN -PIEKEN, AANSLUITINGEN OP ONJUISTE SPANNING OF VERKEERDE ELEKTRISCHE NETSPANNING, VIRUSSEN, MALWARE, ROEKELOOS, OPZETTELIIK OF BEWUST GEDRAG OF NALATIGHEID. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONDERHOUD AAN HET PRODUCT DAT NIET VOORAF DOOR LUXOTTICA IS GOEDGEKEURD. SCHADE VEROORZAAKT DOOR GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE INSTRUCTIES/ DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES/DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT OF HET NIET UITVOEREN VAN REINIGING OF PREVENTIEF ONDERHOUD. SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE COMBINATIE VAN HET PRODUCT MET ANDERE PRODUCTEN DIE NIET ALS LUXOTTICA ZIJN GEMERKT, ACCESSOIRES,

ONDERDELEN OF COMPONENTEN OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, APPARATUUR, SYSTEMEN, VOORZIENINGEN, DIENSTEN, SOFTWARE, ONDERDELEN, ACCESSOIRES, APPLICATIES, INSTALLATIES, REPARATIES, EXTERNE BEKABELING OF CONNECTOREN DIE NIET DOOR LUXOTTICA ZIJN GELEVERD OF TOEGESTAAN EN DIE HET PRODUCT BESCHADIGEN. SIGNAALPROBLEMEN, ONTVANGSTPROBLEMEN EN VERVORMING DOOR RUIS, ECHO, STORING OF ANDERE PROBLEMEN MET SIGNAALOVERDRACHT EN -LEVERING. ALLE APPARATUUR OF ONDERDELEN DIE NIET BIJ UW PRODUCT WERDEN GELEVERD OF INBEGREPEN WAREN BIJ DE OORSPRONKELIJKE VERKOOP. NORMALE SLIJTAGE. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONJUIST TRANSPORT OF VERPAKKING BIJ HET RETOURNEREN VAN HET PRODUCT AAN LUXOTTICA OF EEN INZAMELINGSDEALER. SCHADE VEROORZAAKT DOOR WIJZIGING OF AANPASSING DIE NODIG KAN ZIJN OM EEN PRODUCT TE LATEN WERKEN IN EEN ANDER LAND DAN HET LAND WAARVOOR HET IS ONTWORPEN, GEFABRICEERD, GOEDGEKEURD EN/OF TOEGESTAAN, OF REPARATIE VAN HET PRODUCT DIE SCHADE VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN DEZE WIJZIGINGEN. SCHADE AAN PRODUCTEN WAARBIJ DE ANTI-VERVALSINGSCODE (OF EQUIVALENT) IS VERWIJDERD, UITGEVAAGD, BESCHADIGD, AANGEPAST OF ONLEESBAAR GEMAAKT.

Deze garantie bevat geen specifieke garanties dat het product foutloos zal zijn. Behalve in de VS en voor zover verboden door toepasselijke wetgeving in enig ander land, vervalt deze garantie als een product geretourneerd wordt met verwijderde, beschadigde of gemanipuleerde labels of enige wijzigingen (met inbegrip van het ongeoorloofd verwijderen van een onderdeel of externe behuizing).

IMPLICIETE GARANTIES

BEHALVE IN DE EU, EVA EN HET VK, EN BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IN EEN ANDER LAND, WORDT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AFGEWEEZEN. ALLEEN VOOR DE VS GELDT DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, UITDRUKKELIJK BEPERKT ZIJN TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE ZOALS VERMELD IN DEZE GARANTIE. ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE ONDER DE QUEBEC CONSUMER PROTECTION ACT VALT, BEPERKT DE AFWIJZING VAN GARANTIE IN DEZE SECTIE UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN ONDER DEZE WET NIET, INCLUSIEF HET RECHT OM EEN CLAIM IN TE DIENEN OP BASIS VAN EEN VAN DE WETTELIJKE GARANTIES DIE WORDEN VERSTREKT ONDER ARTIKEL 34 TOT 54 VAN DEZE WET.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS LUXOTTICA OP GROND VAN DEZE GARANTIE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR SCHENDING VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LUXOTTICA VOOR EEN CLAIM VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GARANTIE BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT BETAALDE, PLUS EVENTUELE WETTELIJK TOEGESTANE RENTE, ONGEACHT DE VORM VAN DE CLAIM. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS LUXOTTICA NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEBEURTENISSEN BUITEN HAAR INVLOEDSSFEER, ZOALS OVERMAGT, VIRUSSEN, SCHADE AAN EIGENDOM,

VERLIES VAN GEBRUIK, ONDERBREKING

VAN DE BEDRIJFSVOERING, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF BIJZONDERE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN, VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE, UIT OVEREENKOMST OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID).

Deze Garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten onder de toepasselijke staats- en nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen.

In sommige landen, staten, provincies en gebieden (waaronder de EU, EVA en het VK) is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schade of verlies, of zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan. Daarom zijn de beperkingen of uitsluitingen die in deze garantie worden beschreven mogelijk niet op u van toepassing.

RETOURNEREN EN RUILEN:

Als u Nuanco Audio™-producten heeft gekocht bij een EssilorLuxottica-verkooppunt, kunt u deze binnen 30 dagen na de aankoopdatum retourneren, of binnen een langere periode die uitdrukkelijk is bepaald door de toepasselijke wetgeving of het specifieke EssilorLuxottica-verkooppunt. Nuanco Audio™-producten die via niet-EssilorLuxottica-winkels zijn gekocht, moeten worden geretourneerd aan die winkels volgens hun retourbeleid. Voor meer informatie over het retourneren bij EssilorLuxottica, kunt u terecht op: <http://www.nuanceaudio.com/nl-nl/c/ondersteuning/zenden-en-retourneren>.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milaan, Italië



Gemaakt in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Voor de meest recente gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en garantie-informatie, raadpleeg de instructies in het ondersteuningsgedeelte van de Nuance Audio™ App en de volgende webpagina: nuanceaudio.com/ondersteuning/handleiding



Ondersteuning: nuanceaudio.com/contact-us

Deze snelstartgids is van toepassing op AAW0002EL & REB0080A0 Nuance Audio™ afstandsbediening.

