

Nuance Audio Charging Pad

Instructies voor Gebruik Veiligheid & Garantie



Nuance Audio™ Charging Pad

* De beschikbaarheid van producten, wettelijke voorschriften en garantievoorwaarden kunnen per land verschillen. Houd er rekening mee dat de productcategorie van de Nuance Audio™ Plus en de Nuance Audio™ Glasses per land kan verschillen, afhankelijk van de markt waar het product wordt verkocht. Sommige landen hanteren geen eigen lokale categorie (zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland). Hierdoor kan de terminologie die gebruikt wordt om de productcategorie aan te duiden, variëren in de verschillende taalversies van deze Gebruiksaanwijzing – Veiligheid & Garantie (bijvoorbeeld "assistant d'écoute" in Frankrijk versus "hearing aid" in andere talen). Omdat dit document per taal in plaats van per land georganiseerd is, weerspiegelt de terminologie die in een bepaalde taalversie voor het product wordt gebruikt, niet noodzakelijkerwijs de categorie die van toepassing is in alle landen waar die taal wordt gesproken. Hoewel Frans bijvoorbeeld de officiële taal van Frankrijk is, is de terminologie die in de Franse versie wordt gebruikt niet van toepassing op de Franse markt; in Frankrijk is de correcte terminologie "assistant d'écoute".

In deze gebruiksaanwijzing wordt de Nuance Audio™ Charging Pad ook wel aangeduid als "Product", "Apparaat" of "Uitrusting".

BEDOELDE TOEPASSINGEN & GEBRUIKERS

Bedoeld gebruik. De Nuance Audio™ Charging Pad-accessoire is bedoeld om de functionaliteit van de Nuance Audio™ Plus mogelijk te maken, met name voor het opladen van het hoortoestel*. De Nuance Audio™ Charging Pad mag alleen worden gebruikt in combinatie met de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ Charging Pad wordt gebruikt om de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus draadloos op te laden. Het heeft een LED aan de bovenkant om de gebruiker informatie te geven over de laadstatus van de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus en het is batterijloos; het werkt dankzij een USB-C Oplaadkabel.

Voor personen van 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ Charging Pad mag alleen worden gebruikt in combinatie met de de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. Laat niemand onder de 18 jaar de Nuance Audio™ Charging Pad gebruiken. Kinderen kunnen stikken of verstikken als ze de Nuance Audio™ Charging Pad inslikken. Houd de Nuance Audio™ Charging Pad buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg de quick start guide voor afbeeldingen en een gebruiksaanwijzing van de Nuance Audio™ Charging Pad.

Beperkingen op combinaties. De Nuance Audio™ Charging Pad is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ Glasses. Om de Nuance Audio™ Glasses op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB-C Oplaadkabel of andere USB-C-kabels met een USB-wandstekker/adapter (niet meegeleverd). Het wordt ten zeerste afgeraden om de Nuance Audio™ Charging Pad aan te sluiten op een wandstekker/adapter die niet gecertificeerd is voor de markt waarin de Nuance Audio™ Charging Pad wordt verkocht, en die niet is getest en goedgekeurd volgens nationale en lokale normen. De stekker/adapter moet een minimaal uitgangsvermogen van DC5V/1A hebben.

Lees de instructies. Lees en volg alle instructies die bij de Nuance Audio™ Charging Pad zijn inbegrepen voordat u deze gebruikt.

Waarschuwingen.

1. Gebruik de Nuance Audio™ Charging Pad niet als een deel ervan beschadigd is of oververhit raakt, of als het harde, ongebruikelijke geluiden maakt. Als dit gebeurt, haal dan onmiddellijk de stekker van de Nuance Audio™ Charging Pad uit het stopcontact en bezoek vervolgens www.nuanceaudio.com voor nuttige service- en contactinformatie.
2. Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan aan de Nuance Audio™ Charging Pad.

BELANGRIJK! Als de batterij van de Nuance Audio™ Glasses of de batterij van de Nuance Audio™ Plus niet elke 6 maanden na het laatste gebruik volledig wordt opgeladen, kan dit permanente schade

aan de batterij veroorzaken, waardoor de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus mogelijk onbruikbaar worden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING Om het risico op persoonlijk letsel, ongemak of materiële schade te verminderen, lees en volg alstublieft de onderstaande gezondheids- en veiligheidsinformatie voordat u de Nuance Audio™ Charging Pad gebruikt.

Interferentie met persoonlijke medische apparaten. De Nuance Audio™ Charging Pad bevat magnetisch materiaal en componenten die radiogolven uitzenden, wat de werking van medische apparaten zoals, maar niet beperkt tot, pacemakers of andere implanteerbare apparaten, of insulinepompen kan beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat voordat u de Nuance Audio™ Charging Pad gebruikt. Koppel de Nuance Audio™ Charging Pad los van de stroom en hou deze uit de buurt van uw andere medisch apparaat als u enige storing bij uw medisch apparaat opmerkt.

Storing. Controleer dit voordat u de Nuance Audio™ Charging Pad gebruikt in ruimtes waar elektronische apparaten of draadloze apparaten niet zijn toegestaan. Dit kan storingen veroorzaken.

Water en vloeistoffen. Niet onderdompelen in water en uit de buurt van vloeistoffen houden. Blootstelling aan water of andere vloeistoffen kan de Nuance Audio™ Charging Pad beschadigen en letsel veroorzaken. Het is niet waterbestendig en is niet ontworpen om onderdompeling of blootstelling aan andere vloeistoffen te weerstaan. Droog de Nuance Audio™ Charging Pad grondig af als het in contact komt met water. Niet onderdompelen in water en niet langdurig in een vochtige omgeving bewaren.

WAARSCHUWING: Mogelijk explosieve atmosferen

Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als de Nuance Audio™ Charging Pad. Gebruik de Nuance Audio™ Charging Pad niet in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer.

Niet gebruiken als ze kapot of beschadigd is.

Oververhitting. Houd de Nuance Audio™ Charging Pad uit de buurt van vuur en extreme hitte (bijvoorbeeld door het niet in direct zonlicht, in de buurt van kaarsen of in een hete auto te bewaren) om brandwonden of schade aan de Nuance Audio™ Charging Pad te voorkomen. De Nuance Audio™ Charging Pad mag bij normaal gebruik niet oververhitten. Als dat het geval is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact

op met de ondersteuning. Houd de Nuance Audio™ Charging Pad uit de buurt van vuur en warmtebronnen.

Voorzichtig behandelen en schade voorkomen. De Nuance Audio™ Charging Pad is een gevoelig elektronisch apparaat en dient met zorg te worden behandeld. Verwarm of buig de Nuance Audio™ Charging Pad niet, aangezien deze beschadigd kan raken en zelfs vlam kan vatten. Laat de Nuance Audio™ Charging Pad niet vallen, sla er niet op en schud het niet overmatig. Gebruik de Nuance Audio™ Charging Pad niet als deze beschadigd is. Probeer de Nuance Audio™ Charging Pad niet te openen, demonteren of te manipuleren. Niet blootstellen aan de zon. Plaats het apparaat niet in de buurt van krachtige elektrische apparaten. Vermijd een omgeving met sterke magnetische velden. Als het product niet meer werkt, kan de normale werking worden hersteld door het uit het magnetische veld te verwijderen.

Interacties en omgevingen

Beperkingen in gebruik en functionaliteit

1: Plaats de Nuance Audio™ Charging Pad plat op het bureau om wiebelen te voorkomen.

2: Plaats de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus gevouwen en ondersteboven op de Nuance Audio™ Charging Pad. Raadpleeg de quick start guide voor afbeeldingen.

3: Zorg ervoor dat de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus uitgelijnd zijn met de magnetische componenten op de Nuance Audio™ Charging Pad. De LED op de Nuance Audio™ Charging Pad licht oranje of groen op wanneer deze correct uitgelijnd zijn. Als de uitlijning niet correct is, kunt u proberen de hoek of positie van de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus aan te passen.

4: Tijdens het opladen mag u de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus niet verplaatsen en niet blootstellen aan sterke trillingen, om te voorkomen dat het laadproces wordt verstoord.

5: Als de Nuance Audio™ Charging Pad niet goed oplaadt of storingen vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

Gedetailleerde systeemvereisten en servicevoorwaarden zijn beschikbaar op www.nuanceaudio.com.

Vliegen. Controleer de geldende veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke elektronische apparaten in de luchtvaart voordat u met de Nuance Audio™ Charging Pad gaat vliegen. Gebruik de Nuance Audio™ Charging Pad in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften. Gebruik gezond verstand en respecteer de rechten, privacy en vertrouwelijkheid van derden.

Bedrijfsomstandigheden. -10°C tot 35°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa; luchtvochtigheid tussen 20% en 60%

onder 35°C gedurende 1000 uur; maximale hoogte van 13.000 ft gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C.

Transport en opslag.

Nuance Audio™ Charging Pad blijft functioneel na herstel na opslag bij minimaal -30°C of maximaal 75°C; hoge luchtvochtigheid van 90% en temperatuur van 35°C gedurende 288 uur; blootstelling aan een hoogte van 40.000 ft (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij zowel -10°C als 35°C.

Schoonmaak en onderhoud. Om de Nuance Audio™ Charging Pad schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en neutrale zeep. Vermijd alle soorten sprays, oplosmiddelen, chemicaliën of reinigingsmiddelen die alcohol of ammoniak bevatten. Gebruik geen vuile of schurende doeken die de Nuance Audio™ Charging Pad kunnen beschadigen. Houd de Nuance Audio™ Charging Pad droog. Als het product te nat wordt, bestaat het risico dat de oplaadfunctie beschadigd raakt. Droog het daarom grondig af en bewaar het in een container met droogmiddel of in een drooghoes.

Opladen, elektrisch & warmte

Opladen. Gebruik uitsluitend de Nuance Audio™ Charging Pad om de Nuance Audio™ Glasses op te laden. Gebruik de meegeleverde USB-C Oplaadkabel of andere USB-C-kabels (C naar C) met een USB-wandstekker/adapter (niet meegeleverd). Het wordt ten zeerste afgeraden om de Nuance Audio™ Charging Pad aan te sluiten op een wandstekker/adapter die niet gecertificeerd is voor de markt waarin de Nuance Audio™ Charging Pad wordt verkocht, en die niet is getest en goedgekeurd volgens nationale en lokale normen. De stekker/adapter moet een minimaal uitgangsvermogen van DC5V/1A hebben. Reinig de Nuance Audio™ Charging Pad niet terwijl deze aan het opladen is. Laad de Nuance Audio™ Glasses of de Nuance Audio™ Plus niet op op metalen oppervlakken of in omgevingen met sterke elektrische of magnetische velden. Controleer de Nuance Audio™ Charging Pad en de USB-C Oplaadkabel regelmatig op beschadigingen of slijtage. Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of gebarsten is, of als een intern onderdeel blootligt. Probeer de Nuance Audio™ Charging Pad niet zelf te repareren of onderdelen te vervangen. Neem in plaats daarvan contact op met de klantenservice via www.nuanceaudio.com.

Accessoires. Gebruik dit apparaat uitsluitend met de hierboven aangegeven compatibele USB-C-kabels en wandstekkers/adapters. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de Nuance Audio™ Charging Pad of de Nuance Audio™ Glasses permanent beschadigen, de beperkte garantie van Luxottica ongeldig maken en het risico op letsel of schade aan andere eigendommen vergroten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
DRAADLOOS OPLADEN	
Zendfrequentie	13,56 MHz (RF)
Ontvangstfrequentie	13,56 MHz
Maximaal uitgestraald vermogen	-8,88 dBuA/m op 10 m
Modulatietype zenden	ASK 100% aangepaste Miller
Modulatietype ontvangen	Load modulation met subcarrier fc/16 (848kbit/s) OOK Manchester
Oplaadtijd	4 uur (0 > 100%)
Snelle oplaadtijd	30 minuten (0 > 12%)
BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Batterij	Batterijloos
Levensduur	3 jaar
Houdbaarheid	5 jaar
TRANSPORT- EN OPSLAGVOORWAARDEN	
Temperatuur	Van -30°C tot BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Vochtigheid	Van 20% tot hoge luchtvochtigheid van 90% en een temperatuur van 35°C gedurende 288 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 40.000 ft (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij zowel -10 °C als 35 °C

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN	
Temperatuur	Van -10°C tot 35°C
Vochtigheid	Van 20% tot 60% luchtvochtigheid bij 35°C gedurende 1000 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 3.960 m gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa

Opmerking: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het Apparaat te bedienen ongeldig maken.

Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd, gewijzigd, verspreid of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

EU-conformiteitsverklaring

Luxottica Group S.p.A verklaart hierbij dat dit Apparaat voldoet aan de Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU, de EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en de RoHS II-richtlijn 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Houd de Nuance Audio™ Charging Pad op afstand van de buik van zwangere vrouwen. Houd de Nuance Audio™ Charging Pad op afstand van de onderbuik van adolescenten.

Gebruik de Nuance Audio™ Charging Pad in een omgeving met goede ontvangst om de hoeveelheid ontvangen elektromagnetische straling te verminderen.



De eindgebruiker is verplicht om elk ernstig incident dat zich voordoet bij het gebruik van het Apparaat te melden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden en aan de fabrikant van het Apparaat.

INFORMATIE OVER HET AFVOEREN VAN NUANCE AUDIO™ PRODUCTEN

Luxottica zet zich in voor het juiste hergebruik, de recycling en terugwinning van batterijen en afval van elektrische en elektronische apparatuur ("AEEA").

Batterijen en AEEA mogen niet in normale huishoudelijke afvalbakken worden weggegooid.

Gooi het Product en de batterij weg volgens de lokale voorschriften. Niet bij het huisvuil weggooien.

Breng ze naar aangewezen inzamelpunten of als alternatief naar een aangesloten winkel.

Voor meer informatie over correcte inzameling, bezoek www.nuanceaudio.com.

INFORMATIE OVER HET AFVOEREN

De symbolen van de doorgestreepte afvalbakken hieronder betekenen dat, volgens de plaatselijke wet- en regelgeving, de Nuance Audio™-producten apart van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer de Nuance Audio™-producten het einde van hun levensduur bereiken, kunt u deze inleveren bij een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt. Als alternatief kunt u het Product en de batterij naar een aangesloten winkel brengen. De gescheiden inzameling en recycling van de Nuance Audio™-producten helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat deze op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.



Doorstreepte afvalcontainer op wielen (AEEA):

Gooi elektrische en elektronische apparatuur niet weg met het huishoudelijk afval. Afzonderlijk inzamelen voor correcte recycling (Richtlijn 2012/19/EU).

Informatie over het afvoeren alleen voor Frankrijk



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LUXOTTICA BEPERKTE GARANTIE

NIET VOOR CANADA

Deze beperkte consumentengarantie (de "Garantie") wordt verstrekt door Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milaan, Italië ("Luxottica"). Deze garantie dekt defecten en storingen in het Luxottica-Product waarmee zij wordt geleverd. De garantie loopt één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van het Product (de "Beperkte Garantieperiode"). Als u het Product echter binnen de EU of EFTA aanschafft, bedraagt de beperkte garantieperiode twee (2) jaar.

Deze garantie is alleen van toepassing op die landen waar Nuance officieel op de markt wordt gebracht en ondersteund, wat betekent landen waar het Product is gecertificeerd en Luxottica gemachtigd is om het te distribueren ("Garantiegebied").

Wij garanderen dat het Product, bij normaal en beoogd gebruik, gedurende de Beperkte Garantieperiode in overeenstemming met de technische specificaties of de bijbehorende productdocumentatie (de "Gegarandeerde Functionaliteit") zal functioneren. Voor alle duidelijkheid: alle diensten die nodig zijn om de Gegarandeerde Functionaliteit te bereiken, kunnen worden bijgewerkt, gewijzigd of beperkt, zolang de Gegarandeerde Functionaliteit behouden blijft (of wordt overtroffen). Deze garantie is niet van toepassing op producten die bij een andere bron dan Luxottica of een erkende dealer zijn aangekocht. Deze garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Als u ons een Product stuurt zonder geldig aankoopbewijs, behouden wij ons het recht voor om het Product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf zijn betaald, bewaren wij het product dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast ook andere rechten hebben op grond van consumentenbeschermingswetten of -regelgeving in het land waar het product is gekocht of, indien anders, waar u zich bevindt, mits dit product daar op het moment dat de garantie van toepassing is officieel op de markt wordt gebracht. Dergelijke rechten verschillen van staat tot staat en van land tot land. De voordelen die door deze garantie worden verleend, zijn aanvullend op en doen geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen die worden toegekend door dergelijke consumentenbeschermingswetten

en -regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, nationale wetten ter implementatie van Richtlijn 1999/44/EG en Richtlijn 2019/771). U heeft recht op kosteloze oplossingen indien het Product niet voldoet aan de vereisten zoals vastgesteld in de wetten van het garantiestedingsgebied. De andere rechtsmiddelen die volgens de wetgeving in het Garantiegebied voor u beschikbaar zijn, worden niet beïnvloed door deze Garantie. Voor volledige informatie over uw rechten volgens de wetgeving in het garantiegebied, zie hieronder en/of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie/burgeradviesbureau. Bezoek ons op www.nuanceaudio.com voor informatie over de landen waar Luxottica ondersteuning biedt en om nuttige service- en contactinformatie te verkrijgen. De reikwijdte van de technische ondersteuning die door Luxottica wordt aangeboden, bestaat uit het helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met defecten in het product. Houd er rekening mee dat bij telefonisch contact met Luxottica, afhankelijk van uw gebied, kosten voor interlokaal bellen in rekening kunnen worden gebracht.

REGISTRATIE

Productregistratie is geen voorwaarde voor dekking onder deze garantie, maar voor sommige Luxottica-producten is periodieke verbinding met een online account vereist om volledige functionaliteit te garanderen.

HOE EEN GARANTIECLAIM INDIENEN

Als u een probleem heeft met uw Product, tenzij elders in deze garantie specifiek anders vermeld is en behoudens de toepasselijke wetgeving, dient u voor het indienen van een garantieclaim uw Product samen met het aankoopbewijs terug te brengen naar de erkende dealer waar het product werd gekocht. Ga naar www.nuanceaudio.com voor nuttige informatie over service- en contactgegevens. Als uw garantieclaim geldig wordt bevonden en wij een defect of storing bevestigen die onder deze garantie valt, zal de juiste oplossing worden bepaald. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij een van de volgende acties ondernemen: i) Het Product repareren, maar alleen wanneer reparatie technisch mogelijk is (gezien het hoogtechnologische karakter van het Product is de enige mogelijke reparatie het vervangen van de lens); of (ii) Het Product vervangen; of (iii) De aankoopprijs van het Product terugbetalen, indien noch reparatie noch vervanging mogelijk of gepast is. Onder voorbehoud van uw rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving van het garantiegebied, ligt de keuze van de oplossing bij het bedrijf.

Onder voorbehoud van uw rechten onder de plaatselijke wetgeving, kan een Product dat vervangen moet worden, indien wij daartoe besluiten, een nieuw, gereviseerd of opnieuw gefabriceerd product zijn. De Beperkte Garantietermijn wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de tijd waarin wij het product in ons bezit hadden voor de uitvoering van de Garantie, zoals hierboven beschreven. Voor zover uw rechten en rechtsmiddelen op grond van de lokale wetgeving onverlet blijven, leidt het verstrekken van een gerepareerd of vervangen Product niet tot het opnieuw ingaan of enige verlenging van de Beperkte Garantieperiode.

We kunnen het originele Product mogelijk niet aan u retourneren. Als uw garantieclaim niet gegrond wordt bevonden, behouden wij ons het recht voor het Product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf worden betaald, bewaren wij het Product gedurende dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen, waarna het wordt verwijderd.

Behalve voor zover de wet anders vereist, worden eventuele kosten die u maakt voor het retourneren van het Product voor garantiebeoordeling door Luxottica gedragen. Als u uw product naar Luxottica moet retourneren, ontvangt u een vooraf betaald verzendlabel. Als de garantieclaim ongeldig wordt bevonden en wij geen defect of storing vaststellen die onder deze garantie valt, nemen wij contact met u op om te vragen of u wilt dat wij de reparatie op uw kosten uitvoeren. In elk geval worden de verzendkosten voor het terugsturen van uw Product in rekening gebracht volgens de standaardtarieven van Luxottica.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

DEZE GARANTIE DEKT NIET, EN LUXOTTICA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR: LEVERING OF INSTALLATIE, OF ARBEIDSKOSTEN VOOR HET INSTELLEN VAN HET PRODUCT EN/OF HET AANPASSEN VAN KLANTINSTELLINGEN OP HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK, ONEIGENLIJK GEBRUIK, ONGELUKKEN, BRAND, DIEFSTAL, VERDWIJNING, VERKEERDE PLAATSING, SCHOMMELINGEN EN STROOMPIEKEN, AANSLUITINGEN OP ONJUISTE SPANNING OF VERKEERDE ELEKTRISCHE NETSPANNING, VIRUSSEN, MALWARE, ROEKeloos, OPZETTELIJK OF BEWUST GEDRAG OF NALATIGHEID. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONDERHOUD AAN HET PRODUCT DAT NIET VOORAF DOOR LUXOTTICA IS GOEDGEKEURD.

SCHADE VEROORZAAKT DOOR GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE INSTRUCTIES/ DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE

INSTRUCTIES/DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT OF HET NIET UITVOEREN VAN REINIGING OF PREVENTIEF ONDERHOUD. SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE COMBINATIE VAN HET PRODUCT MET ANDERE NIET-LUXOTTICA GEMERKTE PRODUCTEN, ACCESSOIRES, ONDERDELEN OF COMPONENTEN OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, APPARATUUR, SYSTEMEN, VOORZIENINGEN, DIENSTEN, SOFTWARE, ONDERDELEN, ACCESSOIRES, APPLICATIES, INSTALLATIES, REPARATIES, EXTERNE BEKABELING OF CONNECTOREN DIE NIET DOOR LUXOTTICA ZIJN GELEVERD OF GEAUTORISEERD EN DIE HET PRODUCT BESCHADIGEN. SIGNAALPROBLEMEN, ONTVANGSTPROBLEMEN EN VERVORMING DOOR RUIS, ECHO, STORING OF ANDERE PROBLEMEN MET SIGNAALOVERDRACHT EN -LEVERING. ALLE APPARATUUR OF ONDERDELEN DIE NIET BIJ UW PRODUCT WERDEN GELEVERD OF INBEGREPEN WAREN BIJ DE OORSPRONKELIJKE VERKOOP. NORMALE SLIJTAG. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONJUIST TRANSPORT OF VERPAKKING BIJ HET RETOURNEREN VAN HET PRODUCT AAN LUXOTTICA OF EEN INZAMELINGSDEALER. SCHADE VEROORZAAKT DOOR WIJZIGING OF AANPASSING DIE NODIG KAN ZIJN OM EEN PRODUCT TE LATEN WERKEN IN EEN ANDER LAND DAN HET LAND WAARVOOR HET IS ONTWORPEN, GEFABRICEERD, GOEDGEKEURD EN/OF GEAUTORISEERD, OF REPARATIE VAN HET PRODUCT DIE SCHADE VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN DEZE WIJZIGINGEN. SCHADE AAN PRODUCTEN WAARBIJ DE ANTI-VERVALSINGSCODE (OF EQUIVALENT) IS VERWIJDERD, UITGEVAAGD, BESCHADIGD, AANGEPAST OF ONLEESBAAR GEMAAKT. Deze Garantie bevat geen specifieke garanties dat het product foutloos zal zijn. Behalve in de VS en voor zover verboden door toepasselijke wetgeving in enig ander land, vervalt deze Garantie als een Product geretourneerd wordt met verwijderde, beschadigde of gemanipuleerde labels of enige wijzigingen (inclusief het ongeoorloofd verwijderen van een onderdeel of externe behuizing).

IMPLICIETE GARANTIES

BEHALVE IN DE EU, EFTA EN HET VK, EN BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IN EEN ANDER LAND, WORDT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AFGEWEEZEN.

ALLEEN VOOR DE VS GELDT DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN UITDRUKKELIJK BEPERKT ZIJN TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE ZOALS VERMELD IN DEZE GARANTIE.

ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE ONDER DE QUEBEC CONSUMER PROTECTION ACT VALT, BEPERKT DE AFWIJZING VAN GARANTIE IN DEZE SECTIE UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN ONDER DEZE WET NIET, INCLUSIEF HET RECHT OM EEN CLAIM IN TE DIENEN OP BASIS VAN EEN VAN DE WETTELIJKE GARANTIES DIE WORDEN VERSTREKT ONDER ARTIKEL 34 TOT 54 VAN DEZE WET.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS LUXOTTICA OP GROND VAN DEZE GARANTIE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR SCHENDING VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LUXOTTICA VOOR EEN CLAIM VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GARANTIE BEPERKT TOT DE DOOR U VOOR HET PRODUCT BETAALDE AANKOOPPRIJS, PLUS EVENTUELE WETTELIJK TOEGESTANE RENTE, ONGEACHT DE VORM VAN DE CLAIM.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS LUXOTTICA NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEBEURTENISSEN BUITEN HAAR INVLOEDSSFEER, ZOALS OVERMACHT, VIRUSSEN, SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GEBRUIK, ONDERBREKING

VAN DE BEDRIJFSVOERING, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN, VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE, UIT OVEREENKOMST OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID).

Deze Garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten onder de toepasselijke staats- en nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen.

In sommige landen, staten, provincies en gebieden (waaronder de EU, EFTA en het VK) is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schade of verlies, of beperkingen op de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan. Daarom zijn de beperkingen of uitsluitingen die in deze garantie worden beschreven mogelijk niet op u van toepassing.

VOOR CONSUMENTEN IN AUSTRALIË

Voor aankopen gedaan bij een winkel die wordt geëxploiteerd door Luxottica in Australië, is de leverancier Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758), gevestigd op niveau 34, 1 Denison Street, North

Sydney, NSW, 2060. Voor aankopen gedaan via het groothandelskanaal: de Leverancier is Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) gevestigd op niveau 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische Consumentenwet. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstige tekortkoming en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het gebrek geen ernstige tekortkoming betreft. Uw rechten en de voordelen die u onder deze garantie worden geboden, zijn aanvullend op andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u hebt onder de Australische consumentenwetgeving en andere wetten.

VOOR CONSUMENTEN IN ITALIË

Deze garantie is een vrijwillige garantie van Luxottica, verstrekt in overeenstemming met artikel 135-quinquies van wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 (de "Consumentenwet"). Naast deze garantie hebben consumenten recht op de rechten zoals vastgelegd in de artikelen 128-135-septies van het Consumentenwetboek, die van toepassing zijn gedurende twee (2) jaar vanaf de datum waarop het product wordt geleverd. Dienovereenkomstig doet deze garantie geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument uit hoofde van de wettelijke conformiteitsgarantie. Voor meer informatie over uw rechten volgens de artikelen 128-135-septies van het Consumentenwetboek, gelieve www.nuanceaudio.com te raadplegen.

VOOR CONSUMENTEN IN FRANKRIJK

De consument heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om aanspraak te maken op de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie in het geval van non-conformiteit. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen aan te tonen dat er sprake was van een non-conformiteit, en niet de datum waarop deze zich voordeed.

Indien de koopovereenkomst voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie gedurende de gehele gespecificeerde leveringsperiode van toepassing op die digitale inhoud of digitale dienst. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen aan te tonen dat er sprake is van een non-conformiteit met betrekking tot de digitale inhoud of digitale dienst, en niet de datum waarop deze zich heeft voorgedaan.

De wettelijke conformiteitsgarantie vereist dat de professional, waar van toepassing, alle noodzakelijke updates uitvoert om de conformiteit van de goederen te waarborgen.

De wettelijke conformiteitsgarantie verleent de consument het recht om de goederen binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder noemenswaardig ongemak te laten repareren of vervangen. Als de goederen worden gerepareerd onder de wettelijke garantie van conformiteit, geniet de consument van een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.

Als de consument om reparatie van de goederen verzoekt, maar de verkoper aandringt op vervanging, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie vernieuwd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van vervanging van de goederen.

De consument kan een verlaging van de aankoop prijs verkrijgen door de goederen te behouden of de overeenkomst ontbinden en een volledige terugbetaling ontvangen in ruil voor het retourneren van de goederen, indien:

1° De professional weigert de goederen te repareren of te vervangen;

2° De reparatie of vervanging van de goederen plaatsvindt na een periode van dertig dagen;

3° De reparatie of vervanging van de goederen een groot ongemak veroorzaakt voor de consument, met name wanneer de consument definitief de kosten draagt voor het terugzenden of verwijderen van de niet-conforme goederen, of wanneer hij de kosten draagt voor de installatie van de gerepareerde of vervangende goederen;

4° De non-conformiteit van de goederen blijft bestaan ondanks de mislukte poging van de verkoper om de conformiteit te waarborgen.

De consument heeft ook recht op prijsverlaging of ontbinding van het contract wanneer de non-conformiteit zo ernstig is dat dit een onmiddellijke prijsverlaging of ontbinding van het contract rechtvaardigt. In dit geval hoeft de consument niet vooraf om reparatie of vervanging van de goederen te verzoeken. De consument heeft geen recht om de koop te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming gering is. Elke periode waarin de goederen buiten gebruik zijn voor reparatie of vervanging, schorst de resterende garantie totdat de gerepareerde goederen geleverd zijn.

De bovenstaande rechten vloeien voort uit de toepassing van de artikelen L. 217-1 tot en met L. 217-32 van het Consumentenwetboek.

Een verkoper die te kwader trouw handelt om de uitvoering van de wettelijke garantie van conformiteit te belemmeren, is aansprakelijk voor een civiele boete van maximaal €300.000, die verhoogd kan worden tot 10% van de gemiddelde jaarlijkse omzet (artikel L. 241-5 van het Consumentenwetboek).

De consument geniet tevens van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, zoals vastgelegd in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van twee jaar vanaf de vaststelling van het gebrek. Deze garantie verleent de consument recht op een prijsverlaging als de goederen behouden worden, of op een volledige terugbetaling bij retournering van de goederen. Deze commerciële garantie verleent geen aanvullende rechten zijn aanvullend op de wettelijke conformiteitsgarantie zoals voorzien in de artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van het Consumentenwetboek. Deze commerciële garantie doet geen afbreuk aan de rechten en verhaalsmogelijkheden van consumenten op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie.

Tot slot is de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing op Franse consumenten in het geval van een schending van een van Luxottica's verplichtingen.

VOOR CONSUMENTEN IN DUITSLAND

Uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen onder het Duitse recht worden niet aangetast door deze garantie. U heeft het recht om deze wettelijke rechten en rechtsmiddelen kosteloos uit te oefenen. Deze garantie geldt naast alle toepasselijke contractuele en/of wettelijke garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen en beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen tegenover Luxottica, de retailer of andere dwingende rechten en rechtsmiddelen onder Duits of EU-recht.

VOOR CONSUMENTEN IN DE VS

ALLEEN VOOR DE VS GELDT DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN UITDRUKKELIJK BEPERKT ZIJN TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE ZOALS VERMELD IN DEZE BEPERKTE CONSUMENTENGARANTIE (DE "GARANTIE").

Voor producten die in Californië zijn gekocht:

Dit Nuance Audio™ hoortoestel en de bijbehorende accessoires zijn gegarandeerd specifiek afgestemd op de behoeften van u, de koper. Als het hoortoestel in eerste instantie niet geschikt blijkt voor uw specifieke behoeften, kunt u het binnen 45 dagen na de leveringsdatum retourneren aan de verkoper. Als u het hoortoestel retourneert, zal de verkoper het hoortoestel aanpassen of vervangen, of het

volledige betaalde bedrag direct terugbetalen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de bescherming en rechtsmiddelen die u op grond van andere wetten hebt.

RETOURNEREN EN RUILEN

Als u Nuance Audio™-producten heeft gekocht bij een EssilorLuxottica-banner, kunt u deze binnen 30 dagen na de aankoopdatum retourneren, of binnen een langere periode die uitdrukkelijk is bepaald door de toepasselijke wetgeving of de specifieke EssilorLuxottica-banner. Nuance Audio™-producten die via niet-EssilorLuxottica-winkels zijn gekocht, moeten worden geretourneerd aan die winkels volgens hun retourbeleid. Voor meer informatie over het retourneren bij EssilorLuxottica, kunt u terecht op: www.nuanceaudio.com/nl-nl/c/support/shipping-and-returns.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milaan, Italië



Gemaakt in China



www.nuanceaudio.com



Voor de meest recente gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften en garantie-informatie, raadpleeg de instructies in het ondersteuningsgedeelte van de Nuance Audio™ App en de volgende webpagina: nuanceaudio.com/support/manual-guide



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milaan, Italië

Deze Instructies voor Gebruik, Veiligheid en Garantie zijn van toepassing op de Nuance Audio™ Charging Pad AAW0001EL & REL0063A0.
Productbeschikbaarheid, wettelijke vereisten en garantievoorzwaarden kunnen per land verschillen.



2026/05 MQLSE - M58R-NL REV 0