

Nuance Audio Charging Pad

**Bruksanvisning
säkerhet och garanti**



Nuance Audio™ Charging Pad

* Produkttillgänglighet, regulatoriska krav och garantivillkor kan variera från land till land. Observera att den lokala produktkategorin för Nuance Audio™ Plus och Nuance Audio™ Glasses kan variera beroende på den marknad inom vilken produkten säljs, och att vissa länder inte har en särskild lokal kategori (t.ex. Storbritannien, Australien och Nya Zeeland). Därför kan terminologin som används för att beteckna produktens kategori variera mellan språkversionerna i denna bruksanvisning, säkerhetsinformation och garanti (t.ex. "assistant d'écoute" i Frankrike jämfört med "hörselhjälpmedel" på andra håll). Eftersom detta dokument är organiserat efter språk snarare än efter land, återspeglar inte den terminologi som används för att omnämna produkten i en viss språkversion nödvändigtvis den kategori som är tillämplig i alla länder där det språket används. Till exempel, även om franska är Frankrikes officiella språk, gäller inte terminologin som används i den franska versionen för den franska marknaden; för Frankrike är den korrekta terminologin "assistant d'écoute".

"Nuance Audio™ Charging Pad kallas i denna bruksanvisning även för "Produkt", "Enhet" eller "Utrustning".

AVSEDDA ANVÄNDNINGAR OCH ANVÄNDARE

Avsedd användning. Nuance Audio™ Charging Pad är avsedd att möjliggöra Nuance Audio™ Plus funktionalitet genom att ladda hörselhjälpmedlet*. Nuance Audio™ Charging Pad får endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus och är endast avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Nuance Audio™ Charging Pad används för att trådlöst ladda Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus. Den har en LED-lampa som syns ovanifrån, vilken ger information till användaren om laddningsstatusen för Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus. Produkten har inget batteri, utan drivs istället med hjälp av en USB-C-kabel.

Från 18 års ålder. Nuance Audio™ Charging Pad ska endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus och är endast avsedd att användas av personer som är 18 år eller äldre.

Tillåt inte någon under 18 år att använda Nuance Audio™ Charging Pad. Barn kan sätta i halsen eller kvävas om de sväljer Nuance Audio™ Charging Pad. Håll Nuance Audio™ Charging Pad utom räckhåll för barn. Se snabbguiden för bilder och förklaringar av hur Nuance Audio™ Charging Pad används.

Kompatibilitetsbegränsningar. Nuance Audio™ Charging Pad får endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses. Använd den medföljande USB-C-laddningskabeln eller en annan USB-C-kabel, tillsammans med en USB-väggkontakt/-adapter (medföljer ej) för att ladda Nuance Audio™ Glasses. Det avråds starkt från att ansluta Nuance Audio™ Charging Pad till en väggkontakt/ adapter som inte är certifierad för den marknad där Nuance Audio™ Charging Pad marknadsförs, och som inte har testats och godkänts enligt nationella och lokala standarder. Väggkontakten/adaptern måste ha en lägsta uteffekt på DC5V/1A.

Läs instruktionerna. Läs och följ alla instruktioner som medföljer Nuance Audio™ Charging Pad innan du använder den.

Försiktighetsåtgärder.

1. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad om någon del av den är skadad eller överhettad eller om den avger något högt ovanligt ljud. Om detta händer ska du omedelbart koppla ur Nuance Audio™ Charging Pad från strömkällan. Besök oss sedan på www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation.
2. Gör inga obehöriga ändringar på Nuance Audio™ Charging Pad.

VIKTIGT! Om batteriet i Nuance Audio™ Glasses eller batteriet i Nuance Audio™ Plus inte laddas upp helt var sjätte månad från senaste användning, kan detta leda till permanent skada på batteriet, vilket kan göra Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus obrukbara.

HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION

VARNING För att minska risken för personskador, obehag eller skador på egendom, ska du läsa och följa

hälsosäkerhetsinformationen nedan innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad.

Störning av personliga medicintekniska produkter. Nuance Audio™ Charging Pad innehåller magnetiska material och komponenter som avger radiovågor, vilket kan påverka funktionen hos medicintekniska produkter, såsom men inte begränsat till pacemakers eller andra implanterbara enheter, eller insulinpumpar. Har du någon av dessa nämnda produkter bör du rådfråga din läkare eller tillverkaren av den medicintekniska produkten innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad. Koppla ur Nuance Audio™ Charging Pad från strömkällan och flytta bort den från den andra medicinska apparaten om du märker av någon störning av din medicinska enhet.

Interferens. Kontrollera innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad om elektroniska eller trådlösa enheter är tillåtna på platsen, eftersom den kan orsaka störningar.

Vatten & vätskor. Produkten får inte nedsänkas i vatten och ska hållas på avstånd från vätskor. Exponering för vatten eller andra vätskor kan skada Nuance Audio™ Charging Pad och leda till personskador. Produkten är inte vattentålig och är inte avsedd att sänkas ned i vatten eller komma i kontakt med andra vätskor. I händelse av vattenexponering ska du noggrant torka av Nuance Audio™ Charging Pad. Blötlägg den inte i vatten och placera den inte i fuktiga miljöer under längre tid.

WARNING Potentiellt explosiva atmosfärer

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som Nuance Audio™ Charging Pad. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad när du befinner dig i ett område med potentiellt explosiva atmosfärer.

Använd inte om den är trasig eller skadad.

Överhettning. Håll Nuance Audio™ Charging Pad borta från eld och för hög värme (t.ex. från förvaring i direkt solljus, nära sterinljus eller i en varm bil). Detta för att undvika brännskador eller skador på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pad ska inte överhettas vid normal användning. Om så sker ska du omedelbart sluta använda den och kontakta supporten. Håll Nuance Audio™ Charging Pad på avstånd från eld och värmekällor.

Hantera varsamt och undvik skador. Nuance Audio™ Charging Pad är känslig elektronisk utrustning och bör hanteras med försiktighet. Värm inte upp och böj inte Nuance Audio™ Charging Pad, eftersom den kan skadas och till och med börja brinna. Tappa inte, stöt inte till, och skaka inte Nuance Audio™

Charging Pad. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad om den är skadad. Försök inte att öppna, demontera eller manipulera Nuance Audio™ Charging Pad. Exponera inte för solljus. Placera den inte i närheten av elektriska produkter med hög effekt. Ha den inte i en starkt magnetisk miljö. Om produkten slutar fungera kan dess normala funktion återställas genom att flytta bort den från det magnetiska fältet.

Interaktioner och miljöer

Användnings- och funktionsbegränsningar

1: Placera Nuance Audio™ Charging Pad på en plan yta, till exempel ett skrivbord, så att den står stadigt.

2: Placera Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus ihopvikta och upp och ner på Nuance Audio™ Charging Pad. Se snabbstartsguiden för bilder.

3: Se till att Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus är i linje med de magnetiska komponenterna på Nuance Audio™ Charging Pad. LED-lampan på Nuance Audio™ Charging Pad kommer att lysa orange eller grönt när de är korrekt inriktade. Om inriktningen inte är exakt kan du försöka justera vinkeln eller positionen för Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus.

4: Under laddningsprocessen får Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus inte flyttas eller vibrera för mycket. Det skulle kunna påverka laddningseffekten.

5: Om Nuance Audio™ Charging Pad inte kan laddas ordentligt, eller om den inte fungerar som den ska, ska du omedelbart sluta använda den.

Detaljerade systemkrav och användarvillkor finns tillgängliga på www.nuanceaudio.com.

Flygning. Kontrollera tillämpliga säkerhetsrestriktioner för personlig elektronik innan du flyger med Nuance Audio™ Glasses och Nuance Audio™ Charging Pad. Använd Nuance Audio™ Charging Pad i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar, regler och förordningar. Använd sunt förnuft och respektera tredje parts rättigheter, integritet och konfidentialitet.

Driftsförhållanden. Driftsförhållanden: -10 °C till 35 °C; 101,3 kPa till 61,9 kPa; luftfuktighet mellan 20 % och 60 % under 35 °C i 1000 timmar; maximal höjd på 13 000 fot i 1 timme vid 0 °C och 35 °C.

Transport och förvaring.

Nuance Audio™ Charging Pad ska förbli funktionell efter återhämtning från minimala -30 °C eller maximala 75 °C lagringstemperaturer; hög luftfuktighet 90 % och temperatur 35 °C i 288 timmar; exponering för höjd på 40 000 fot (12 192 m) (18,8 kPa) i 12 timmar vid både -10 °C (14 °F) och 35 °C.

Rengöring och underhåll. För att rengöra Nuance Audio™ Charging Pad ska du använda en fuktad rengöringsduk och mild tvål, och se till att undvika alla sorters sprayer, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol eller ammoniak. Använd inte en smutsig rengöringsduk som kan skada Nuance Audio™ Charging Pad.

Förvara Nuance Audio™ Charging Pad torrt. Produktens laddningsfunktion kan skadas om den blir för våt. Torka i sådana fall av den noggrant och förvara den i en behållare med torkmedel eller i en torkbox.

Laddning, elektrisk och värme

Laddning. Använd endast Nuance Audio™ Charging Pad för att ladda Nuance Audio™ Glasses. Använd den medföljande USB-C laddningskabeln eller andra kablar av USB-C-typ, C till C, med en USB-väggkontakt/adapter (medföljer ej). Det avråds starkt från att ansluta Nuance Audio™ Charging Pad till en väggkontakt/ adapter som inte är certifierad för den marknad där Nuance Audio™ Charging Pad marknadsförs, och som inte har testats och godkänts enligt nationella och lokala standarder. Väggkontakten/adaptern måste ha en lägsta uteffekt på DC5V/1A.

Rengör inte Nuance Audio™ Charging Pad medan du laddar den. Ladda inte Nuance Audio™ Glasses eller Nuance Audio™ Plus på metallytor eller i miljöer med starka elektriska eller magnetiska fält. Inspektera regelbundet Nuance Audio™ Charging Pad och USB-C laddningskabeln avseende skador eller tecken på slitage. Använd inte om någon del är skadad eller sprucken eller om någon intern komponent är exponerad. Försök inte att reparera Nuance Audio™ Charging Pad eller byta delar själv, kontakta istället supporten på www.nuanceaudio.com.

Tillbehör. Använd endast med de kompatibla USB-C-kablar och vägguttag/adaptrar som anges ovan. Att använda icke godkända tillbehör kan permanent skada Nuance Audio™ Charging Pad eller Nuance Audio™ Glasses, ogiltigförklara Luxotticas begränsade garanti och öka risken för personskada eller skada på annan egendom.

NYCKELFUNKTIONER	
TRÅDLÖS LADDNING	
Överföringsfrekvens	13,56 MHz (RF)
Mottagningsfrekvens	13,56 MHz
Maximal utstrålad effekt	-8.88 dBuA/m vid 10m
Modulationstyp för sändning	ASK 100 % modifierad Miller
Modulationstyp för mottagning	Lastmodulering fc/16 (848 kbit/s) OOK Manchester
Laddningstid	4 timmar (0 > 100 %)
Snabbladdningstid	30 minuter (0 > 12 %)
NYCKELFUNKTIONER	
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Batteri	Batterilös
Livstid	3 år
Hållbarhetstid	5 år
TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	
Temperatur	Från -30°C till 75°C
Luftfuktighet	Från 20 % till hög luftfuktighet 90 % och temperatur 35 °C (113°F) i 288 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd på 40 000 fot (12 192 m) (18,8 kPa) i 12 timmar vid både -10 °C (14 °F) och 35 °C (113 °F)

DRIFTSVILLKOR	
Temperatur	Från -10 °C till 35 °C
Luftfuktighet	Från 20 % till 60 % luftfuktighet under 35 °C (95 °F) i 1 000 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd av 13.000 fot i 1 timme vid 0°C (32°F) och 35°C (95°F); 101,3 kPa till 61,9 kPa

Observera: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Ingen del av detta verk får reproduceras, modifieras, distribueras eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt tillstånd.

EU-försäkran om överensstämmelse

Luxottica Group S.p.A försäkrar härmed att denna enhet uppfyller direktivet för radioutrustning 2014/53/EU, EU:s förordning om medicintekniska produkter 2017/745 om medicintekniska produkter och RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Den fullständiga texten avseende EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration. Håll Nuance Audio™ Charging Pad på avstånd från gravida kvinnors mage. Håll Nuance Audio™ Charging Pad på avstånd från ungdomars nedre bukdelen.

Använd Nuance Audio™ Charging Pad under goda mottagningsförhållanden för att minska mängden elektromagnetisk strålning som tas emot.



Slutanvändaren är skyldig att rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med användningen av enheten till behörig myndighet i det medlemsland där incidenten inträffade, samt till tillverkaren av enheten.

INFORMATION OM KASSERING AV NUANCE AUDIO™-PRODUKTER

Luxottica åtar sig att säkerställa korrekt återanvändning och återvinning av batterier och avfall från elektronisk och elektrisk utrustning ("EE-avfall").

Batterier och EE-avfall får inte kasseras bland vanligt hushållsavfall.

Kassera produkten och batteriet enligt lokala föreskrifter. Kassera inte som hushållsavfall. Ta med dem till en återvinningsstation eller till en ansluten butik.

Besök gärna www.nuanceaudio.com för mer information om korrekt insamling.

INFORMATION OM KASSERING

Symbolerna med den överstrukna soptunnan nedan betyder att Nuance Audio™-produkter, enligt lokala lagar och regler, ska kasseras separat från hushållsavfall. När Nuance Audio™-produkterna uppnått sin livslängd, ska de tas med till en återvinningsstation. Alternativt ska produkten och batteriet tas med till en ansluten butik. Den separata insamlingen och återvinningen av Nuance Audio™-produkter kommer att bidra till att bevara naturresurser och säkerställa att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.



En överkorsad soptunna (EE-avfall):

Kassera inte elektrisk och elektronisk utrustning bland hushållsavfall. Samla in separat för korrekt återvinning (Direktiv 2012/19/EU).

Avfallshanteringsinformation endast gällande Frankrike



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LUXOTTICAS BEGRÄNSADE GARANTI

INTE FÖR KANADA

Denna begränsade konsumentgaranti ("Garantin") tillhandahålls av Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denna garanti täcker defekter och funktionsfel hos den Luxottica-produkt som den åtföljer. Garantin fortlöper i ett (1) år från inköpsdatumet för produkten (den "begränsade garantiperioden"). Om du köper produkten inom EU, Storbritannien eller EFTA, är dock den begränsade garantiperioden två (2) år.

Denna garanti gäller endast de länder där Nuance officiellt marknadsförs och stöds, det vill säga länder där produkten är certifierad och Luxottica är auktoriserad att distribuera den ("garantitäckningsområde"). Vi garanterar att Produkten, vid normal och avsedd användning, kommer att fungera i enlighet med de tekniska specifikationerna eller den medföljande produktdokumentationen (den "Garanterade Funktionaliteten") under den Begränsade Garantiperioden. För tydlighets skull kan alla tjänster som krävs för att uppnå den garanterade funktionaliteten uppdateras, modifieras eller begränsas, så länge de fortsätter att upprätthålla (eller överträffa) den garanterade funktionaliteten. Denna garanti gäller inte för produkter som köpts från någon annan aktör än Luxottica eller en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti är giltig endast med ett kvitto som tydligt visar inköpsdatumet. Om du skickar oss en produkt utan giltigt kvitto, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter enligt konsumentskyddslagarna eller -förfordningar i det land där produkten köptes eller, om det skiljer sig åt, där du befinner dig, förutsatt att denna produkt officiellt marknadsförs där vid den tidpunkt då garantiservicen behövs. Sådana rättigheter varierar från stat till stat och land till land. De förmåner som denna garanti ger gäller utöver och påverkar inte några rättigheter och åtgärder som följer av sådana konsumentskyddslagarna och -förfordningar (inklusive, men inte begränsat till, nationella lagar som implementerar direktiv 1999/44/EG och direktiv 2019/771). Du har rätt till kostnadsfria åtgärder om

produkten inte överensstämmer med de krav som anges i lagarna i garantitäckningsområdet. De andra åtgärder du har rätt till enligt lagstiftningen i garantitäckningsområdet påverkas inte av denna garanti. För fullständig information om dina rättigheter enligt lagarna i garantitäckningsområdet: se nedan och/eller kontakta din lokala konsumenträttsorganisation/konsumentvägledning.

Besök oss på www.nuanceaudio.com för information om de länder Luxottica stöder, samt för att få hjälp och kontaktinformation. Omfattningen av den tekniska support som erbjuds av Luxottica består av att hjälpa till att diagnostisera och lösa problem med defekter i produkten. Notera att när du kontakter Luxottica via telefon, kan långdistansavgifter tillkomma, beroende på varifrån du ringer.

REGISTRERING

Produktregistrering krävs inte som en förutsättning för täckning under denna garanti, men vissa Luxottica-produkter kräver periodisk anslutning till ett onlinekonto för att säkerställa full funktionalitet.

SÅ GÖR DU ETT GARANTIANSPRÅK

Om det uppstått ett problem med din produkt, måste du, förutsatt att det inte anges specifikt någon annanstans i denna garanti och med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig nationell lag, för att göra ett garantianspråk, returnera din produkt till den auktoriserade återförsäljare där produkten köptes, tillsammans med ditt köpebevis. Besök www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation. Om ditt garantianspråk bedöms vara giltigt, och vi bekräftar en defekt eller funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer lämplig åtgärd att fastställas. Beroende på omständigheterna kan vi vidta en av följande åtgärder: i) Reparera produkten, endast där reparation är tekniskt genomförbar (med tanke på den högteknologiska innehållet i produkten, är den enda tillgängliga reparationen linsbyte); eller (ii) Ersätta produkten; eller (iii) Återbetala det betalda inköpspriset för produkten, om varken reparation eller ersättning är möjligt eller lämpligt. Med förbehåll för dina rättigheter enligt tillämpliga lokala lagar i garantitäckningsområdet, ligger valet av åtgärd hos företaget.

Med förbehåll för dina rättigheter enligt lokala lagar kan, om vi bedömer att en produkt bör bytas ut, bytet bestå av en ny, renoverad eller ombyggd produkt. Den begränsade garantiperioden förlängs med en tid som är lika med den tid under vilken vi hade produkten i vår besittning för att uppfylla garantin enligt beskrivningen ovan. Med undantag för de rättigheter och åtgärder du har rätt till enligt lokal lagstiftning, så återställer eller förlänger inte tillhandahållandet av en reparerad eller ersatt produkt

den begränsade garantiperioden.

Vi kanske inte återlämnar den ursprungliga produkten till dig. Om ditt garantianspråk inte bedöms vara giltigt, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den innan den bortscaffas.

Förutom i den utsträckning lagen kräver något annat, kommer eventuella kostnader som du ådrar dig för att returnera produkten för garantibedömning att täckas av Luxottica. Om du behöver returnera din produkt till Luxottica kommer du att få en förbetald etikett. Om garantianspråket bedöms vara ogiltigt och vi inte hittar något fel eller någon funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer vi att kontakta dig för att se om du vill att vi ska utföra reparationer på din bekostnad och du kommer, i vilket fall som helst och baserat på Luxotticas standardfraktpriser, att debiteras för frakten för att returnera din produkt.

BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

DENNA GARANTI TÄCKER INTE, OCH LUXOTTICA ANSVARAR INTE FÖR: LEVERANS ELLER INSTALLATION, ELLER ARBETSKOSTNADER FÖR INSTALLATION AV PRODUKTEN OCH/ELLER JUSTERING AV KUNDENS KONTROLLER PÅ PRODUKTEN. SKADOR ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING, OTILLÅTEN ANVÄNDNING, OLYCKOR, BRAND, STÖLD, FÖRSVINNANDE, FELPLACERING, FLUKTUATIONER OCH

SPÄNNINGSTOPPAR, ANSLUTNING TILL FEL SPÄNNING ELLER FEL ELEKTRISK ELNÄTSPÄNNING, VIRUS, MALWARE, ELLER VÅRDSLÖS, AVSIKTIG ELLER MEDVETEN HANDLING ELLER FÖRSUMMELSE. SKADOR ORSAKADE AV SERVICE AV PRODUKTEN SOM INTE PÅ FÖRHAND HAR GODKÄNTS AV LUXOTTICA.

SKADOR ORSAKADE AV ANVÄNDNING SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADOR ORSAKADE AV UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION, ELLER UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA RENGÖRING ELLER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL. SKADOR ORSAKADE AV KOMBINATIONEN AV PRODUKTEN MED ANDRA ICKE-LUXOTTICA-MÄRKTA PRODUKTER, TILLBEHÖR, DELAR ELLER KOMPONENTER, ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER, UTRUSTNING, SYSTEM, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, DELAR, TILLBEHÖR, APPLIKATIONER, INSTALLATIONER, REPARATIONER, EXTERNT KABLAG ELLER

ANSLUTNINGAR SOM INTE TILLHANDAHÅLLITS ELLER GODKÄNTS AV LUXOTTICA OCH SOM SKADAR PRODUKTEN. SIGNALPROBLEM, MOTTAGNINGSPROBLEM OCH DISTORTION RELATERAD TILL BRUS, EKO, INTERFERENS ELLER ANDRA SIGNALÖVERFÖRINGS- OCH LEVERANSPROBLEM. EVENTUELL UTRUSTNING ELLER KOMPONENTER SOM INTE MEDFÖLJDE DIN PRODUKT SOM DEN URSPRUNGLIGEN SÅLDES. NORMALT SLITAGE. SKADA ORSAKAD AV FELAKTIG TRANSPORT ELLER FÖRPACKNING/EMBALLERING VID RETUR AV PRODUKTEN TILL LUXOTTICA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE. SKADOR ORSAKADE AV MODIFIERING ELLER ANPASSNING SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT EN PRODUKT SKA KUNNA FUNGERA I NÅGOT ANNAT LAND ÄN DET LAND FÖR VILKET DEN VAR UTFORMAD, TILLVERKAD, GODKÄND OCH/ELLER AUKTORISERAD, ELLER REPARATION AV PRODUKTEN SOM RESULTERAR I SKADA TILL FÖLJD AV DESSA MODIFIERINGAR. SKADA PÅ PRODUKTER DÄR ANTI-FÖRFALSKNINGSKODEN (ELLER MOTSVARANDE) HAR TAGITS BORT, RADERATS, FÖRLORATS, ÄNDRATS ELLER GJORT OLÄSLIG.

Denna garanti inkluderar inga specifika garantier för att produkten kommer att vara felfri. Förutom i USA och i den utsträckning som det är förbjudet enligt tillämplig lag i något annat land, är denna garanti ogiltig om en produkt returneras med borttagna, skadade eller manipulerade etiketter, eller med några ändringar (inklusive obehörig borttagning av någon komponent eller yttre skydd).

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

FÖRUTOM I EU, EFTA OCH STORBRIANNIEN OCH FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT NÅGON TILLÄMPLIG LAG I NÅGOT ANNAT LAND, AVSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

FÖR USA ENDAST, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM ENLIGT LAG INTE KAN UTESLUTAS, UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN BEGRÄNSADE GARANTITID SOM ANGES I DENNA GARANTI.

OM DU ÄR EN KONSUMENT SOM OMFATTAS AV QUEBEC'S KONSUMENTSKYDDSLAG, BEGRÄNSAR INTE GARANTIFRISKRIVNINGEN I DETTA AVSNITT DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSMEDEL ENLIGT DENNA LAG, INKLUSIVE RÄTTEN ATT GÖRA ANSPRÅK ENLIGT NÅGON AV DE LAGSTADGADE GARANTIER SOM ANGES I AVSNITT 34 TILL 54 I DEN LAGEN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA LUXOTTICA INTE, ENLIGT DENNA GARANTI, HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, BEGRÄNSAS LUXOTTICAS MAXIMALA ANSVAR FÖR NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR UR, ELLER RELATERAR TILL, DENNA GARANTI, TILL DEN KÖPESUMMA DU BETALAT FÖR PRODUKTEN, SAMT EVENTUELL LAGENLIG RÄNTA, OAVSETT ANSPRÅKETS FORM.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ANSVARAR LUXOTTICA INTE FÖR HÄNDELSER SOM LIGGER UTANFÖR DESS KONTROLL, SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, SKADOR PÅ EGENDOM, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, AVBROTT

I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT HUR DESSA ORSAKATS, VID BROTT MOT DENNA GARANTI, AVTAL ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET).

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter enligt tillämplig statlig och nationell lagstiftning avseende försäljning av konsumentvaror.

Vissa länder, stater, provinser och territorier (inklusive EU, EFTA och Storbritannien) tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller följdsador, eller undantag eller begränsning av vissa skador eller typer av förlust, och tillåter inte heller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti eller ett villkor kan gälla, så de begränsningar eller undantag som beskrivs i denna garanti kanske inte gäller för dig.

FÖR KONSUMENTER I AUSTRALIEN

För köp som görs från en detaljhandelsbutik som drivs av Luxottica i Australien, är leverantören Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) Level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. För köp som görs genom grossistkanalen, är leverantören Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) Level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Våra varor medföljs av garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentlagen. Du har rätt till byte eller återbetalning vid större fel, och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att få varorna reparerade eller utbyta om varorna inte håller godtagbar kvalitet och felet

inte utgör ett större fel. De rättigheter och förmåner du får enligt denna garanti gäller utöver de andra lagstadgade rättigheter och åtgärder som du enligt australisk konsumentlag och andra lagar har rätt till.

FÖR KONSUMENTER I ITALIEN

Denna garanti är en frivillig garanti som tillhandahålls av Luxottica i enlighet med artikel 135-quinquies i lagstiftningsdekret nr 206, 6 september 2005 ("konsumentlagen"). Utöver denna garanti har konsumenterna de rättigheter som anges i artiklarna 128–135-septies i konsumentlagen, vilka gäller i två (2) år från det att produkten levererades. Följaktligen påverkar denna garanti inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt den rättsliga garantin om överensstämmelse. Här finns mer information om dina rättigheter enligt artiklarna 128–135-septies i konsumentlagen: www.nuanceaudio.com.

FÖR KONSUMENTER I FRANKRIKE

I händelse av bristande överensstämmelse har konsumenten två år på sig från det att varan levererats för att åberopa den rättsliga garantin om överensstämmelse. Under denna period behöver konsumenten endast fastställa förekomsten av bristen på överensstämmelse och inte datumet då den inträffade.

Om avtalet om köp av varor föreskriver kontinuerlig leverans av digitalt innehåll eller en digital tjänst under en period som överstiger två år, ska den rättsliga garantin gälla för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under hela den angivna leveransperioden. Under denna period behöver konsumenten endast fastställa förekomsten av den brist på överensstämmelse som påverkar det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och inte datumet då denna inträffade.

Den rättsliga garantin om överensstämmelse kräver att näringsidkaren, i tillämpliga fall, tillhandahåller alla uppdateringar som krävs för att upprätthålla varornas överensstämmelse.

Den rättsliga garantin om överensstämmelse ger konsumenten rätt att få varorna reparerade eller utbyta inom trettio dagar från begäran, utan kostnad och utan betydande olägenhet för konsumenten. Om varorna repareras enligt den rättsliga garantin om överensstämmelse, har konsumenten rätt till sex månaders förlängning av den ursprungliga garantin.

Om konsumenten begär reparation av varorna, men säljaren insisterar på byte, förnyas den rättsliga garantin för överensstämmelse med en period på två år från datumet för byte av varorna.

Konsumenten kan få en nedsättning av köpesumman genom att behålla varorna eller avsluta avtalet och få en fullständig återbetalning i utbyte mot att returnera varorna, om:

1° Näringsidkaren vägrar att reparera eller ersätta varorna;

2° Reparationen eller utbytet av varorna sker efter en period på trettio dagar;

3° Reparation eller utbyte av varor orsakar konsumenten en betydande olägenhet, särskilt när konsumenten slutgiltigt bär kostnaderna för att returnera eller avlägsna de icke-överensstämmande varorna, eller om konsumenten bär kostnaderna för att installera de reparerade eller utbytta varorna;

4° Varornas avvikelse kvarstår trots säljarens misslyckade försök att säkerställa överensstämmelse.

Konsumenten har också rätt till prissänkning eller hävning av avtalet när bristen på överensstämmelse är så allvarlig att den motiverar en omedelbar prissänkning eller hävning av avtalet. I detta fall är konsumenten inte skyldig att i förväg begära reparation eller utbyte av varorna.

Konsumenten har inte rätt att häva köpet om bristen på överensstämmelse är ringa. Varje period under vilken varorna är ur bruk för reparation eller utbyte, pausar den återstående garantin tills de reparerade varorna har återlevererats.

Ovanstående rättigheter följer av tillämpningen av artiklarna L. 217-1 till L. 217-32 i konsumentlagen.

En säljare som handlar i ond tro för att hindra genomförandet av den rättsliga garantin om överensstämmelse kan dömas till böter på upp till 300 000 euro, vilka kan höjas till 10 % av den genomsnittliga årsomsättningen (artikel L. 241-5 i konsumentlagen).

Konsumenten har även rätt till den rättsliga garantin avseende dolda fel enligt artiklarna 1641 till 1649 i civilagen, under en period på två år från upptäckten av felet. Denna garanti ger konsumenten rätt till en prisnedsättning om varorna behålls, eller till en fullständig återbetalning om varorna returneras. Denna kommersiella garanti ger inga ytterligare rättigheter utöver den rättsliga garantin om överensstämmelse som anges i artiklarna L. 217-1 till L. 217-32 i konsumentlagen. Denna kommersiella garanti påverkar inte konsumenternas rättigheter och möjligheter enligt den rättsliga garantin om överensstämmelse. Slutligen gäller inte ansvarsbegränsningsklausulen för franska konsumenter vid brott mot någon av Luxotticas skyldigheter.

FÖR KONSUMENTER I TYSKLAND

Dina lagstadgade rättigheter och åtgärder enligt tysk lag påverkas inte av denna garanti. Du har rätt att utan kostnad utöva dessa lagstadgade rättigheter och åtgärder. Denna garanti gäller utöver alla tillämpliga avtalsenliga och/eller lagstadgade garanti- och ansvarsförpliktelser, och begränsar inte

dina lagstadgade rättigheter och åtgärder gentemot Luxottica, återförsäljaren eller andra obligatoriska rättigheter och åtgärder enligt tysk eller EU-lag.

FÖR KONSUMENTER I USA

FÖR USA ENDAST, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM ENLIGT LAG INTE KAN UTESLUTAS, UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN BEGRÄNSADE GARANTITID SOM ANGES I DENNA BEGRÄNSADE KONSUMENTGARANTI ("GARANTIN").

FÖR PRODUKTER SOM KÖPTS I KALIFORNIEN:

Detta Nuance Audio™-hörselhjälpmedel och dess tillbehör är garanterade att vara specifikt anpassade till dina, köparens, specifika behov. Om hörselhjälpmedlet initialt inte passar dina specifika behov, kan det returneras till säljaren inom 45 dagar från det datum då det levererades till dig. Om du returnerar hörselhjälpmedlet kommer säljaren antingen att justera eller byta ut hörselhjälpmedlet, eller skyndsamt återbetala hela det betalda beloppet. Denna garanti påverkar inte det skydd och de åtgärder du enligt andra lagar har rätt till.

RETURER OCH BYTEN:

Om du har köpt Nuance Audio™-produkter från en EssilorLuxottica-bannerannons kan du returnera dem inom 30 dagar från inköpsdatumet, eller under en längre period som uttryckligen anges av tillämplig lag eller den specifika EssilorLuxottica-bannerannonsen. Nuance Audio™ produkter som köpts genom icke-EssilorLuxottica-återförsäljare måste returneras till dessa återförsäljare i enlighet med dessas returpolicyer. Här finner du mer information om EssilorLuxottica-returer:

www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Tillverkad i Kina



www.nuanceaudio.com



Den senaste och uppdaterade "Bruksanvisning, säkerhetsinformation och garanti" hittar du under Instruktioner i supportavsnittet i Nuance Audio™-appen och på följande webbsida:
nuanceaudio.com/support/manual-guide



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien

Dessa instruktioner för användning, säkerhet och garanti gäller för modellerna AAW0001EL och REL0063A0 Nuance Audio™ Charging Pad.
Produkttillgänglighet, myndighetskrav och garantivillkor kan variera beroende på land.

